

CROS対応補聴器：UNIQUE/DREAM/DAILY

※CIC-M、DAILY30はCROS非対応です。

マッチング手順

- ① 受信側となる補聴器は通常通り補聴器のフィッティングを行います。

オーディオグラムを入力した場合、そのデータを使用し、初期設定がされます。
オーディオグラムを入力しない場合、OdBHLとみなして初期設定がされます。

- ② 「使用操作」画面をクリックし、画面左側のナビゲーションパネル内「CROS/BiCROS」をクリックします。




- ③ CROSに電池を入れ、バッテリーホルダーを閉じます。お客様の耳にCROSを装着するか、補聴器と同様に、USBLink通信範囲内にCROSを置き、「マッチング開始」をクリックします。



- ④ 「BiCROS（片耳が聾で反対側が難聴の場合）」で使用するのか、「CROS（片耳が聾で反対側が健聴の場合）」で使用するのかを選択してください。




- ⑤ マイクモードの選択では、初期設定は「ロケーター」が選択されています。基本は「ロケーター」でお使いください。続いて、CROSの電源が入ったときに自動的に通信を開始させる（オン）か、CROSのプログラムボタンを押して通信を開始させる（オフ）かを選択し、「次へ」をクリックしてください。

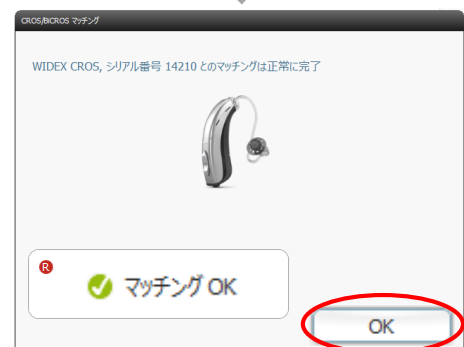

- ⑥ 上記の画面が表示されましたらマッチングは完了です。

マッチングができない場合

以下のようなメッセージが表示された場合、まずは赤枠内の確認事項をご確認ください。

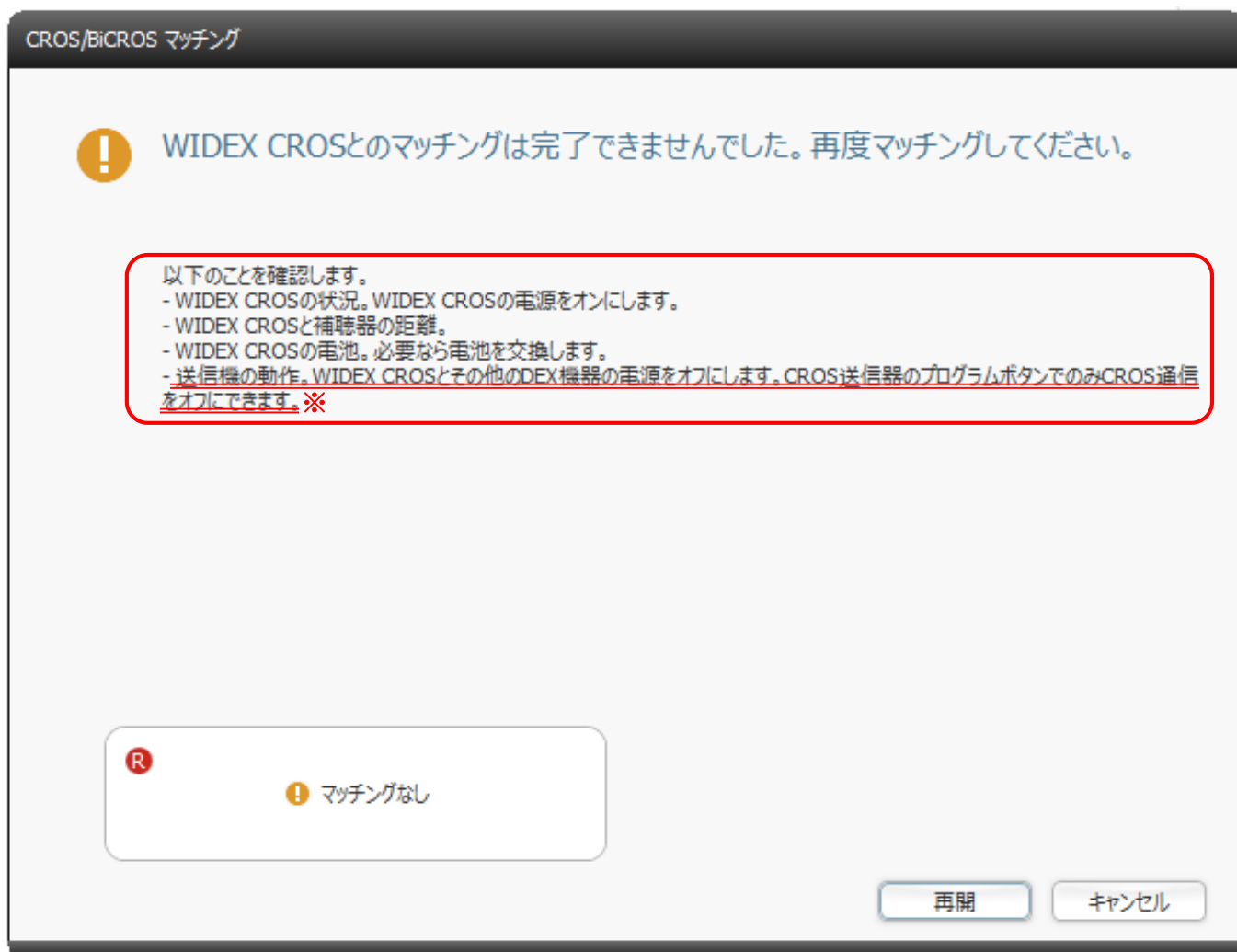

※CROS送信器がすでに『自動送信オン』にされていた場合、電源を入れると送信中となり、マッチングできません。このような場合、CROSのプログラムボタンを一度押し、送信を停止してから再度マッチングを行ってください。