

EVOKEアプリ Android 設定ガイド

※重要：EVOKEアプリは、EVOKE F2モデルのみでお使いになれます。

<EVOKEアプリのダウンロード>

EVOKE（イヴーク）アプリを使用することで、スマートフォンからEVOKEをリモコン操作できます。お使いのAndroidのPlayStore、「widex」で検索、「 WIDEX EVOKE」をタップし、ダウンロードします。

※Android 6.0.1以降で、かつBluetooth v4.2以上が搭載されている必要があります。
なお、スマートフォンの機種により使用できない場合がありますので、予めご確認ください。


<スマートフォンとEVOKEとのペアリング>

スマートフォンでEVOKEを操作するには、ペアリングが必要です。


重要：スマートフォンとEVOKEをペアリングする際は、指示があるまで補聴器の電源をオフにしておいてください。

1. スマートフォンの

「設定」  >
Bluetoothをオンにします。

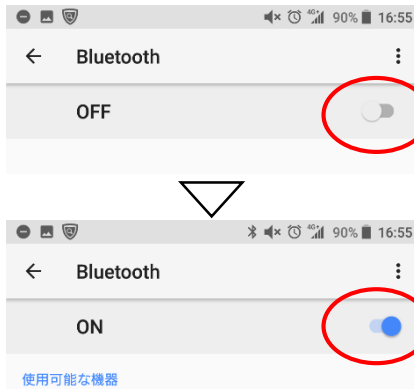


2. 補聴器の電源を入れると、スマートフォンが補聴器を検索します。両耳装用の場合は、別々に表示されます。1台ずつ検索された「(補聴器の名前)」をタップしてペアリングしていきます。

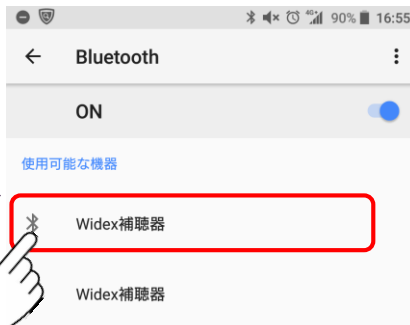


3. タップすると自動でペアリングが始まります。ペアリングには1分程かかることがあります。



4. 両耳装用の場合は、もう1台の「(補聴器の名前)」をタップしてペアリングします。

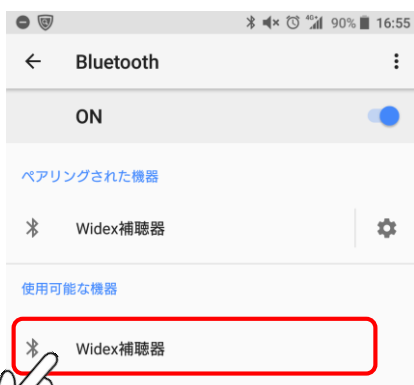

5. 下のような画面になれば、スマートフォンとEVOKEとのペアリングは完了です。ホームボタンをタップしてください。

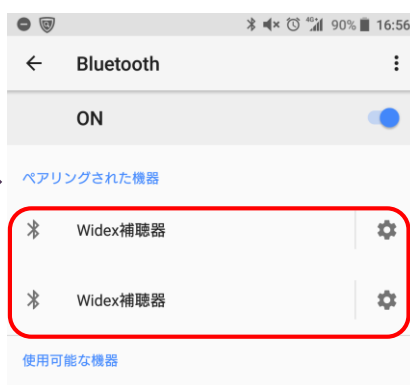

6. EVOKEアプリをタップして起動します。



スマートフォンとのペアリングとEVOKEアプリの起動は以上です。アプリの操作方法は、別紙「EVOKEアプリ 操作ガイド」をご覧ください。

重要：スマートフォンと補聴器が接続できない場合

一度ペアリングすれば、EVOKEの電源をオンにするとEVOKEアプリは自動で接続します。
もし接続できない場合は、次の手順をお試しください。

- EVOKEのバッテリードアを開け、5秒以上経過してから電源を入れ、しばらく待ってみる。
- EVOKEの電池を新しくして、しばらく待ってみる。
- スマートフォンのBluetoothを一度オフにし、10秒程度経過してから再びオンにしてみる。
- スマートフォンのWiFiをオフにしてみる。
- スマートフォンを再起動してから、再度試してみる。