


# EVOKEアプリ iOS 設定ガイド

※重要：EVOKEアプリは、EVOKE F2モデルのみでお使いになれます。

## <EVOKEアプリのダウンロード>

EVOKE（イヴォーク）アプリを使用することで、スマートフォンからEVOKEをリモコン操作できます。  
お使いのiPhoneやiPadのApp Storeで、「widex」で検索、「 WIDEX EVOKE」をタップし、ダウンロードします。  
※iPhone 5S以降でかつiOS 10.x以上が搭載されている必要があります。

## <iPhoneとEVOKEとのペアリング>

iPhoneでEVOKEを操作するには、ペアリングが必要です。

**重要：iPhoneとEVOKEをペアリングする際は、指示があるまで補聴器の電源をオフにしておいてください。**

### 1. iPhoneのホーム画面

「設定」  >  
Bluetoothをオンにします。



### 2. 「一般」 >

「アクセシビリティ」 >  
「MFiヒアリングデバイス」  
の順にタップします。



### 3. EVOKEの電源を入れ、iPhone

が補聴器を検索します。  
検索された「補聴器の名前」を  
タップします。



4. Bluetoothペアリングの要求  
で「ペアリング」をタップします。  
両耳の場合は、2回ペアリング  
要求されます。  
ペアリングには1分程かかること  
があります。



5. 下記のような画面になれば、  
iPhoneとEVOKEのペアリング  
は完了です。  
ホームボタンをタップし、ホー  
ム画面に戻ります。



6. EVOKEアプリをタップして、  
アプリ起動します。



スマートフォンとのペアリングと  
EVOKEアプリの起動は以上です。  
アプリの操作方法は、別紙  
「EVOKEアプリ 操作ガイド」を  
ご覧ください。

## その他にiPhoneとEVOKEでできること

### ● 電話



iPhoneに電話がかかってくると、着信音がEVOKEから聞こえてきます。  
iPhoneの画面を操作して通話してください。相手の音声は、EVOKEにストリーミングされます。

### ● 音声ストリーミング



iPhoneの音声ファイルや動画を再生すると、音声は自動でEVOKEにストリーミングされます。


※ すべてのアプリの動作を保証するものではありません。  
スマートフォンの機能により、使用できない場合がありますので、  
予めご了承ください。

### ● DEX



TV-DEXを使用するとEVOKEに音声はストリーミングされます。  
TV-DEXストリーミング中、EVOKEアプリにはDEXと表示されます。

### ● iPhoneをリモートマイクとして使う

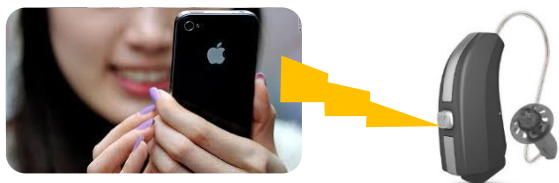

騒がしい場所などで会話音が聞き取りづらい場合は、会話相手にiPhoneを渡し、iPhoneのマイクに向かって話してもらうことで、会話音声をEVOKEにストリーミングすることができます。

#### リモートマイクの使い方

iPhoneのホームボタンをトリプルクリックし、「ライブリスニングを開始」をタップ。



終了するときは、ライブリスニングを再びタップします。



※iPhone Xの場合は、電源ボタンをトリプルクリックします。

#### 重要：スマートフォンとEVOKEが接続できない場合

一度ペアリングすれば、EVOKEの電源をオンにするとEVOKEアプリは自動で接続します。  
もし接続できない場合は、次の手順をお試しください。

- EVOKEのバッテリードアを開け、5秒以上経過してから電源を入れ、しばらく待ってみる。
- EVOKEの電池を新しくし、しばらく待ってみる。
- スマートフォンのBluetoothを一度オフにし、10秒程度経過してから再びオンにしてみる。
- スマートフォンのWiFiをオフにしてみる。
- スマートフォンを再起動してから、再度試してみる。