


EVOKE F2/Z-F2ファームウェア更新

COMPASS GPS V3.1には、EVOKE F2/Z-F2用の新しいファームウェアが含まれています。
EVOKEアプリをお使いの場合はアプリでも補聴器のファームウェア更新は可能ですが、環境によってはファームウェアの更新に15分以上かかる場合があるため、店頭でのCOMPASS GPS V3.1による更新をお勧めします。

※このファームウェアの更新は、EVOKE F2/Z-F2のみです。

1. COMPASS GPS V3.1を起動します。

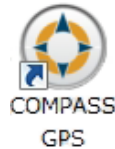

2. EVOKEを接続します。



3. 「ファームウェア更新」をクリックします。



4. 接続した補聴器をクリックします。



5. 「アップデート」ボタンをクリックします。



補聴器のファームウェア更新には、2～5分程かかります。更新が終わるまでお待ちください。



6. 更新が終わったら、「OK」ボタンをクリックします。



以上で、EVOKEのファームウェア更新は完了です。