

耳せんの種類と対応するレシーバー・フック 【UNIQUE・DREAM・DAILY】

WIDEX
HIGH DEFINITION HEARING

2016年8月

【既製耳せんの種類】 既製耳せんの種類と対応するフック・チューブの組み合わせは次の通りです。
フック・チューブ・耳せんを変えた場合は、COMPASS GPSで音響構成を変更してください。

モデル	耳せんの種類と サイズ	EWオープン イヤチップ	EWチューリップ イヤチップ	EWダブルルーム イヤチップ
		XS/S/L	M/L	XS/S/M/L
	イヤワイヤ フック チューブ	低 ← 密閉度 → 高		
PA	EW Sレシーバー イヤワイヤ付き	○	○	○
	EW Mレシーバー イヤワイヤ付き	○	○	○
FS	EW Pレシーバー イヤワイヤ付き	×	○	○
FA FM m-CB	EWフック&チューブ (0.9mm/ 1.4mm共通)	○	○	○

モデル	耳せんの種類 とサイズ	イーチップ (オープン)	チューリップ イヤチップ	イヤチップ 普通の耳せん	クローズ耳せん	ダブルドーム イヤチップ
		1S/2S/1L/2L		SS/S/M/L	SS/S/M/L	S/M/L
	イヤワイヤ フック チューブ	低 ← 密閉度 → 高				
9	フック&チューブ (イーチップ ロック付き)	○	○	×	○	○
FA FM FP/FA-P 9 m-CB	標準フック +チューブ	×	×	○	×	×

【密閉度と選択の目安】 音量感が欲しい場合や利得を上げたい時の音漏れを防止したい場合は密閉度の高いものから、こもり感・閉塞感を軽減したい場合、軽い装用感をご希望の場合は密閉度の低いもの（オープンタイプ）からお選びください。