

EXカスタム（レシーバー） イヤチップの取付け

WIDEX[®]
HIGH DEFINITION HEARING

2017年9月

EW イヤワイヤ付 <S/M/P> レシーバー用、EW フック&チューブ用共通

納品前の準備



適切なイヤワイヤ、またはチューブの長さを選び、補聴器を注文します。
下記「EW イヤワイヤ付レシーバー/EW フック&チューブの長さの選び方」を参考にお客様に
適した長さを選択してください。

1.



EW イヤワイヤ付レシーバー、またはEW フック&チューブに、EXカスタム（レシーバー）イヤチップを取付けます。
裏面「EXカスタム（レシーバー）イヤチップの取付け・取外し」を参考にしてください。

2.



イヤチップの先端にナノケアワックスガードを取付けます。

3.



イヤワイヤ、またはフック&チューブを補聴器に取付けます。



COMPASS GPS/Compassで調整する際は、
実際に使用するレシーバー、またはチューブを選択
し、耳せんの種類に応じた「音響構成」を選択して
ください。



レシーバー
RIC M
イヤチップ/モールド
カスタム ハード イヤチップ
バント
M (0.8 mm)

EW レシーバー イヤワイヤ付/EW フック&チューブの長さの選び方


RIC/RITE用、またはエラン用、m用アソートボックスに入っているイヤセットメジャーを使用します。




耳珠の中央の数字に対応した長さのEW イヤワイヤ付レシーバーを選択します（左の写真では「3」）。2つの数字の間に耳珠の中央がきた場合は、1つ小さい数字に対応した長さを選択します。
※左の写真は一例です。外耳道の形状による個人差があります。

EXカスタム（レシーバー）イヤチップの取付け・取外し


〈 取 付 け 〉

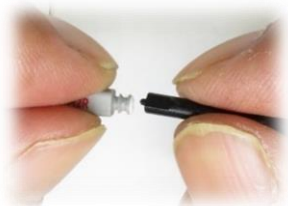

EW イヤワイヤ付レシーバー、またはEW フック&チューブのグレーの部分にナノケアワックスガードが付いていない場合は、必ず取付けてからイヤチップを装着します。

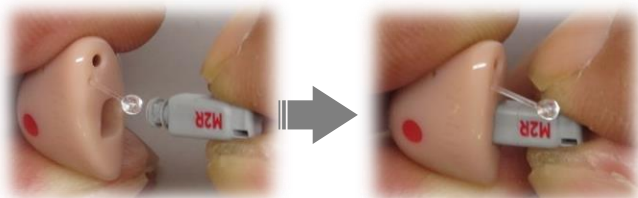

レシーバー、またはチューブをイヤチップに取付けます。レシーバー（グレー）部分が途中まで入ったら、指先でレシーバー（グレー部分）の先端を以下の写真のように奥まで押し込みます。

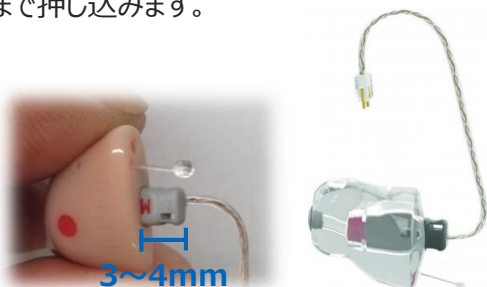

耳の大きさにもよりますが、イヤチップからレシーバーの後方3~4mm程度、外に出ることがあります。




ナノケアワックスガードをイヤチップの先端に取り付けてください。

〈 取 外 し 〉

EW イヤワイヤ付レシーバー


専用の取外しツールを使用します。

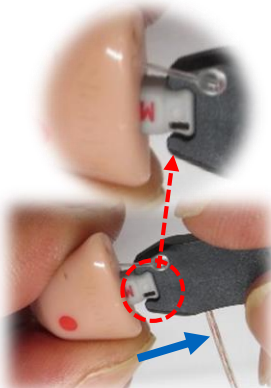

レシーバー後方を取外しツールで挟み、イヤチップからレシーバーを引き抜きます。



EW フック&チューブ

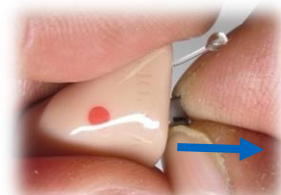

EW フック&チューブのグレー部分を指でつまみ、イヤチップから引き抜きます。



必要に応じて、イヤチップとレシーバー、またはフック&チューブのナノケアワックスガードを交換してください。

レシーバーとイヤチップの両方にナノケアワックスガードを取付けることにより、レシーバーへの耳垢や埃、湿気等の浸入をより防ぎます。