

ノーマルフックをフック&チューブ（イーチップロック付き）に交換する手順


①補聴器を写真と同じ向きに置きます。

（ノーマルフックを外す前に、必ず赤い○印の白いピンを外すこと。）




②ピンセットを使い、ピンを上から垂直に押し抜きます。

ピンは下図の上側が細く、下側が太い構造になっています。必ず写真と同じ向き（細い方）から押し抜きます。

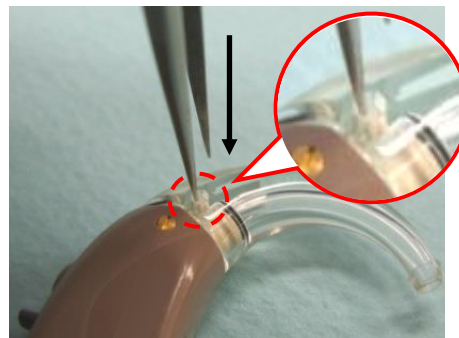

③ピンが外れた状態です。

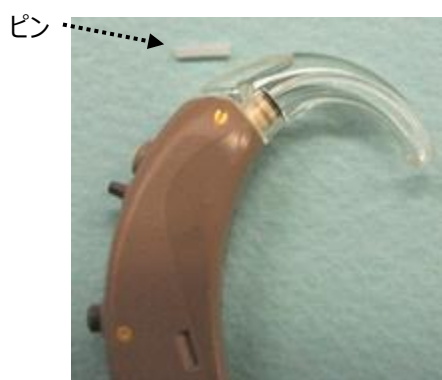

④ノーマルフックを外します。

ノーマルフックはまっすぐ引き抜きます。



⑤フック&チューブ（イーチップロック付き）を取り付けます。
フック&チューブ（イーチップロック付き）のフックをフックコネクションに被せながら、ゆっくり押し付けて取り付けます。



⑥フック&チューブ（イーチップロック付き）のフックがしっかり取り付けられていることを確認します。
以上で、作業は完了です。




※手順を誤るとフックやハウジングを破損する危険性があります。交換の際は、必ずこの手順に従ってください。

フック&チューブ（イーチップロック付き）をノーマルフックに交換する手順

①フック&チューブ（イーチップロック付き）を外します。

補聴器本体とフック&チューブ（イーチップロック付き）を
しっかり持ち、横（矢印）方向に力を加えて外します。
（チューブには力を加えないで下さい）

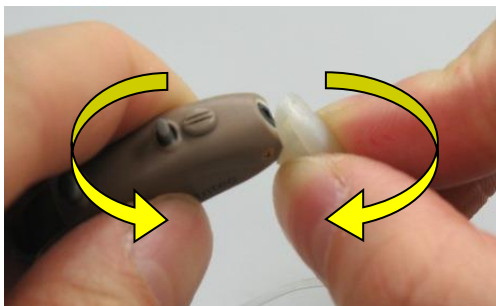

②ノーマルフックを取り付けます。

ノーマルフックをフックコネクションに被せてから、ゆっくり押し
て取り付けます。（フックにピンが入っていない事を確認し
てから行います）




③ノーマルフックにピンを取り付けて固定します。


まず、写真と同じ向きに補聴器を置きます。



④ピンをノーマルフックの穴に取り付ける前に、ピンの向きを確
認します。

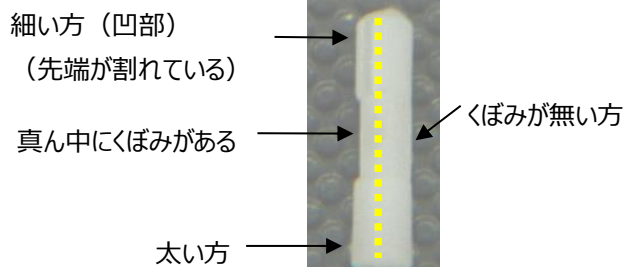

⑤ピンの細い側からフックの穴に差し込みます。この際、ピン
の凹部をフックの穴の中の凸部に合わせて（黄色い点線
部側に、ピンのくぼみが無い方を向けて）下さい。

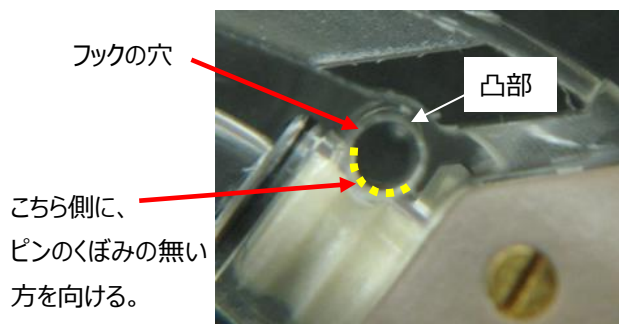

⑥ピンがフックの穴にしっかりと収まっていることを確認します。
以上で、作業は完了です。



※手順を誤るとフックやハウジングを破損する危険性があります。交換の際は、必ずこの手順に従ってください。

※ピンをフックの穴に挿入する際、方向を誤るとフックが正しく固定されません。ご注意ください。