

ワンポイントアドバイス「フック&チューブ(m/FA用)」交換方法 (FASHIONタイプ、mタイプ共通)


<標準フックの外し方>

本体をしっかり持ち、矢印の方向にフックを持ち上げるように外します。



標準フックを取り付ける場合は、凹凸を合わせ、フックを真直ぐ差し込んでください。

※ 取り付け時にフックを回転させないでください。

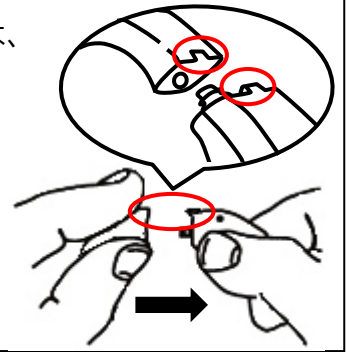


<フック&チューブ(m/FA用)の外し方>

フック&チューブ(m/FA用)の取り外しには、「フック&チューブ(m/FA用)取り外しツール」を用います。「フック&チューブ(m/FA用)取り外しツール」は、m用アソートボックスに同梱されています。専用ツールがなくてもフック&チューブ(m/FA用)を取り外すことができますが、チューブが伸びないようにご注意ください。


「フック&チューブ(m/FA用)取り外しツール」をご用命の際は、下記までご連絡ください。

ワイデックス株式会社 業務部 フリーダイヤル 00777-81810 (部署番号 1) または 03-5631-2935 (直通)


①フック&チューブ(m/FA用)の取り外しには、専用ツールを使用します。

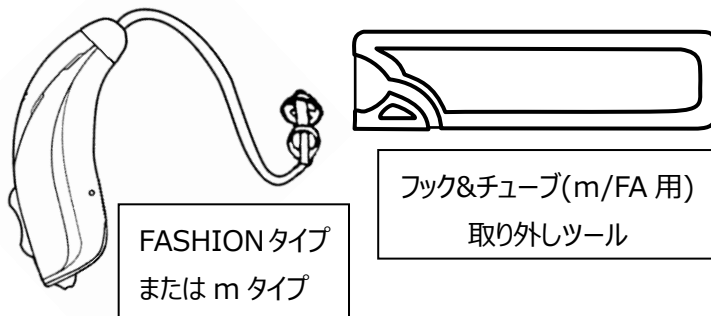

②取り外しツールの溝部分に、フック&チューブ(m/FA用)の根元部分を差し込みます。

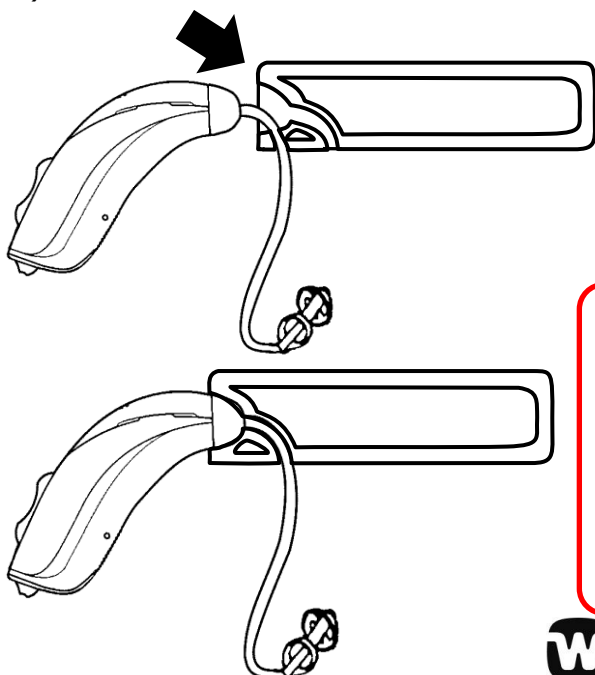

③矢印の方向に取り外しツールを持ち上げて外します。

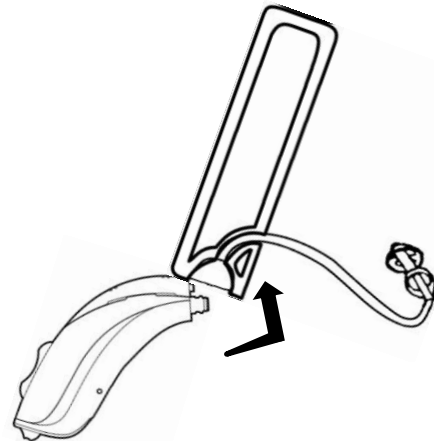

フック&チューブ(m/FA用)を取り付ける際には、チューブを回転させないように注意して差し込んでください。



【専用ツールをお持ちでない場合】

人差し指の上にチューブを置き、親指と中指でしっかりはさみます。その後、フック&チューブ(m/FA用)を勢いよく引っ張ります。

※注意：ゆっくり引っ張らないでください。

チューブが伸びてしまう可能性があります。

