


～ カスタムハードイヤーマールドについて ～

○ カスタムハードイヤーマールドの外し方

カスタムハードイヤーマールドはお客様のお耳にしっかり装着されています。カスタムハードイヤーマールドを外す際は、次の手順で取り外すよう、お客様へご説明ください。

**注意：補聴器やイヤワイヤを持って取り外さないでください。イヤワイヤの断線等の故障の原因になります。**


1. 耳の付け根部分を後方よりイヤーマールドを押し出すように押します。
2. イヤーマールドやテグスを持ち、イヤーマールドの装着状態を緩めます。
3. 補聴器を耳から外し、テグスまたはイヤーマールドを持ち、イヤーマールドを取り出します。

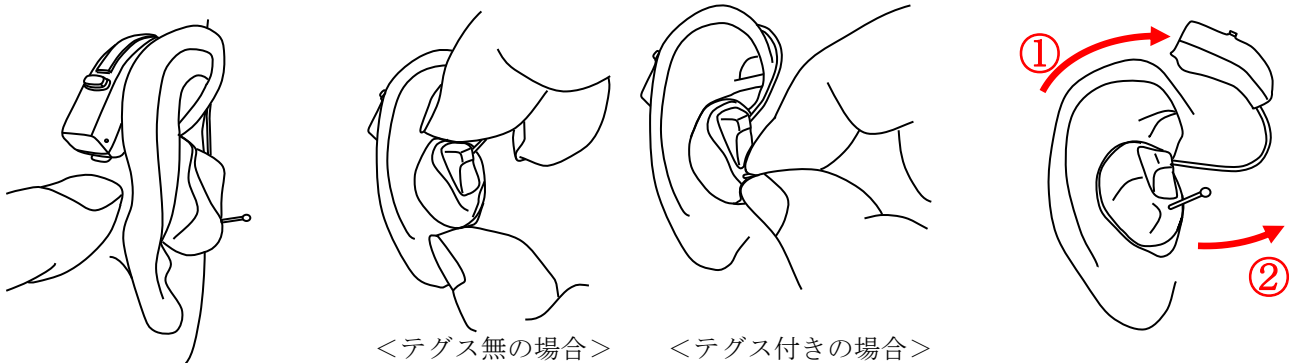

○ カスタムハードイヤーマールドの「標準音口」と「拡張音口」の違い



「拡張音口」は、「標準音口」に比べて音道を長くすることにより、出力周波数特性の一番大きなピークを低い方にシフトしています。

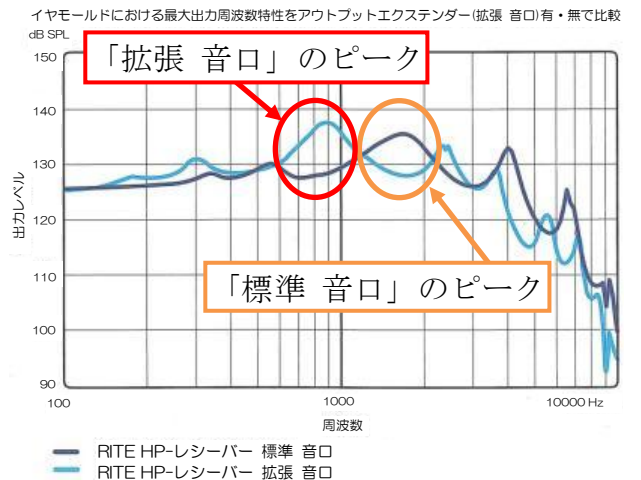

☆ 「拡張音口」をお勧めする方

今まで1kHz付近にピークのある耳かけ型補聴器をお使いの方や大きめの最大出力をご希望の方にお勧めできます。

大きめの音を聞いた時に響くように感じる方は、「標準音口」をお勧めします。

※ お客様の耳道のサイズによっては、カスタムハードイヤーマールドが大きくなる場合があります。

○ Compass 上での設定 (音響構成) …… お使いになる音響構成を選択します。



レシーバーは「RITE(高)」を選択します。

使用する音口を選択します。  
ワイヤ標準 … 「標準音口」  
ワイヤ拡張 … 「拡張音口」