

# RC/TV-DEX クイックマッチング

RC-DEX/TV-DEXは、補聴器とマッチングしないと使用できません。

通常、このマッチング作業は店舗で行いますが、お客様自身でもマッチングできる手順をご説明します。

## ○マッチング手順

補聴器を装着し、電源を入れます。着用者のあごから5cm以内の距離で、DEXリモコンの「+」ボタンと「-」ボタンを5秒ほど長押しします。補聴器から「ポーン」という音が聞こえたらマッチングは完了です。



<RC-DEX>



<TV-コントローラー>



DEXリモコンの「+」ボタンと「-」ボタンを5秒ほど長押し  
⇒補聴器から「ポーン」というお知らせ音が鳴ったら完了

## ○動作確認

### ● RC-DEXをお使いの場合

「+」ボタンや「-」ボタンを押しボリュームが変わるか、プログラムを設定している場合は、プログラム切り替えボタンを押し、確認します。

### ● TV-DEXをお使いの場合

必ずTVコントローラーをTV-ベース（充電台）に戻し、5秒以上充電してください。5秒以上経過したら、TV-ベースからTV-コントローラーを外し、TV-コントローラーの電源ボタンを押して、テレビやオーディオ機器からの音が聞こえるか確認します。

補聴器とマッチング後、  
TV-コントローラーを  
TV-ベースに置き、  
5秒以上充電します。



## ○TV-DEX経由で音が聞こえない場合のチェックポイント

- テレビの音声入力端子につないでいませんか？  
→ 音声出力端子につないでください。音声出力端子がないテレビは、イヤホン端子につないでみてください。
- TV-コントローラーの電源ランプが早い点滅をしている  
→通信範囲外です。TV-ベースとTV-コントローラーとの距離を短くしてみてください
- TV-コントローラーが遅い点滅をしている  
→テレビなどからの信号がTV-ベースに正しく届いていません。テレビやTV-ベースに正しくプラグが取り付けられているか確認してみてください。