



スコラ取り外しツールの使用方法

この取り外しツールは、FM 用シューからスコラフレックスを取り外す時に使用します。


1. 右図のように、取り外しツールを FM 用シューとスコラフレックスの間の角に斜めに差し込みます。

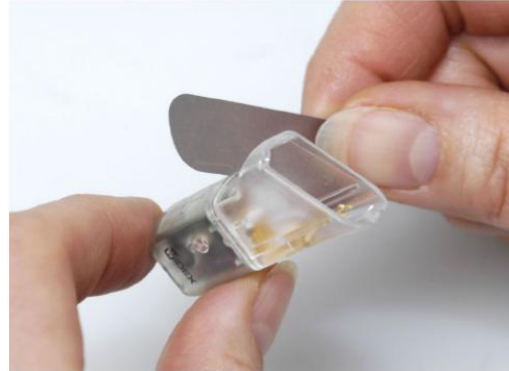

2. 取り外しツールを FM 用シューとスコラフレックスの間にスライドさせ右図のように一辺に差し込みます。ツールをシュー側に向かう方向に押しながら、シューの接続部の段差まで差し込みます。

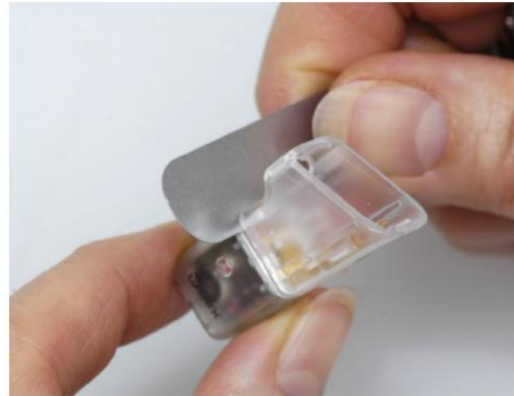

3. スコラフレックスをスライドさせ、FM 用シューを取り外します。
ツールを差し込んだ側の反対側からスコラフレックスを押し、少しずつスライドさせます。

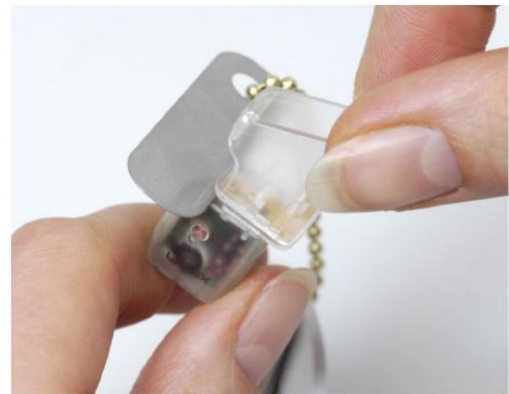

4. 外れにくい場合には、ツールを差し込んだ側を少し開きながら、スコラフレックスを少しねじりながら徐々にスライドしていきます。(図では、左の親指を支点にしながらかき、同じ親指でフレックスをおしていきます。)

