

スコラティーチ→スコラフレックス 操作上の注意

2008年9月
ワイデックス(株)

スコラティーチから受信機（スコラフレックス）を操作できます。

- ・チャンネル同期（CH番号を合わせる）
- ・シンクロ設定（CH番号とスイッチの設定）




磁界による通信のため、スコラティーチおよびスコラフレックスがともに垂直方向にあることを確認してください。
あまり近すぎても通信できない場合がありますので、30cm程度が適当です。
通信可能範囲は15-80cm

重要

チャンネル同期・シンクロ設定でスコラフレックスを操作する場合には、スコラティーチを垂直に持ってください。

チャンネル同期 (15-80cmの範囲)



通常使用モード
確定キー 
を軽く押す



スコラフレックス
CH 13



CH 15



範囲内のスコラフレックスの周波数
チャンネルを一致させる


チャンネル同期

- ティーチの確定ボタンを軽く押す



画面表示


チャンネル情報
シンク口中

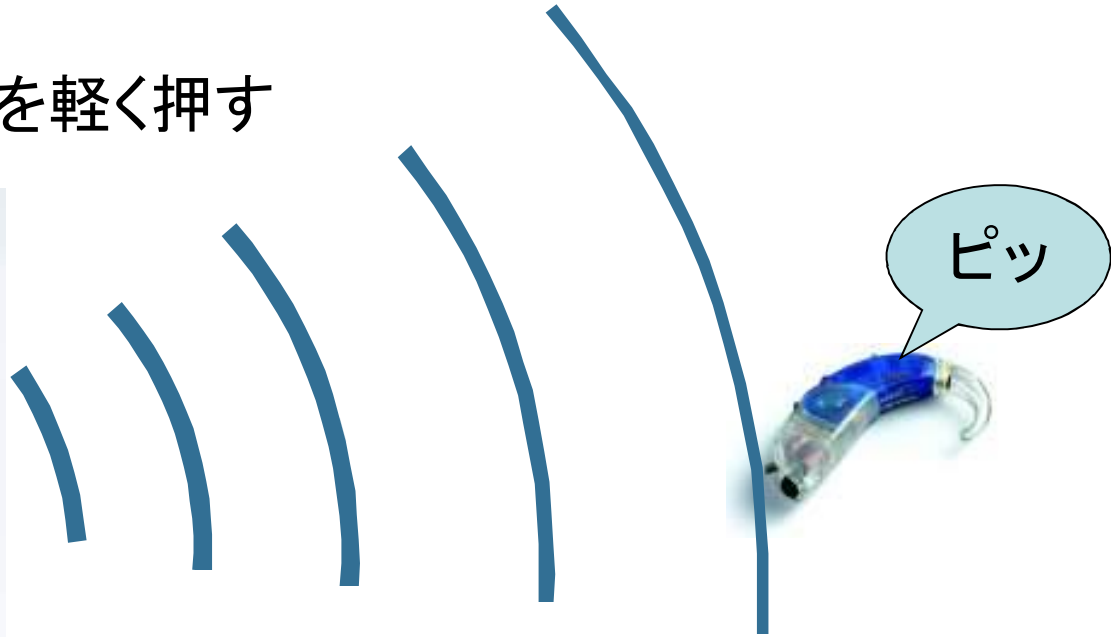

←—————→
操作可能範囲 約 15 cm - 80 cm

シンクロ設定(15-80cmの範囲)



通常使用モード
確定キー 
を長めに押す

シンクロさせる設定例
スイッチ:FM固定
スキャン:オフ



スコラフレックス
CH 13



CH 15
スイッチ:FM固定
スキャン:オフ


範囲内のスコラフレックスの
周波数チャンネルを一致させる
スイッチ・ボタンの設定を一時的
に固定(補聴器電源オフで解除)

シンクロ設定（受信機への操作のみ）

ティーチとフレックスの距離が35-80cm

- ティーチの確定ボタンを長押しする

確認音が出ていれば
設定はされている

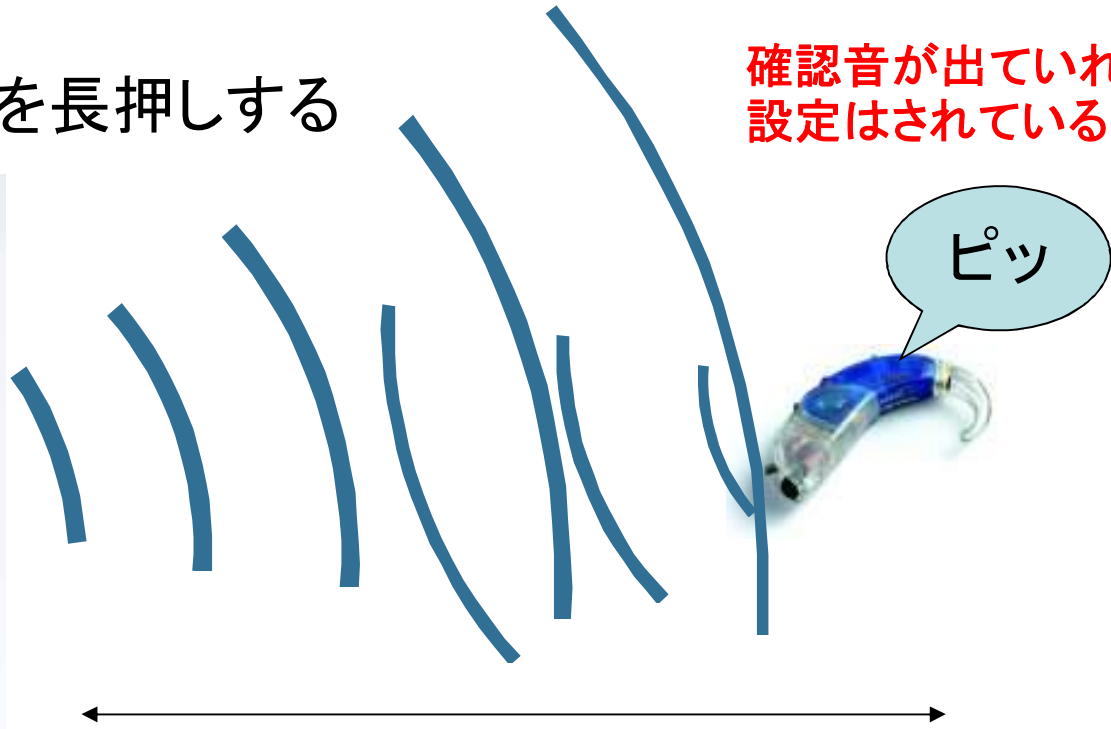

操作可能範囲 約 15 cm - 80 cm

画面表示

設定
シンクロ中


受信機からの
返答が届かない

受信機が検出されません。
何かキーを押してください。

シンクロ設定（受信機からの応答を確認）

ティーチとフレックスの距離が15-35cm

- ティーチの確定ボタンを長押しする

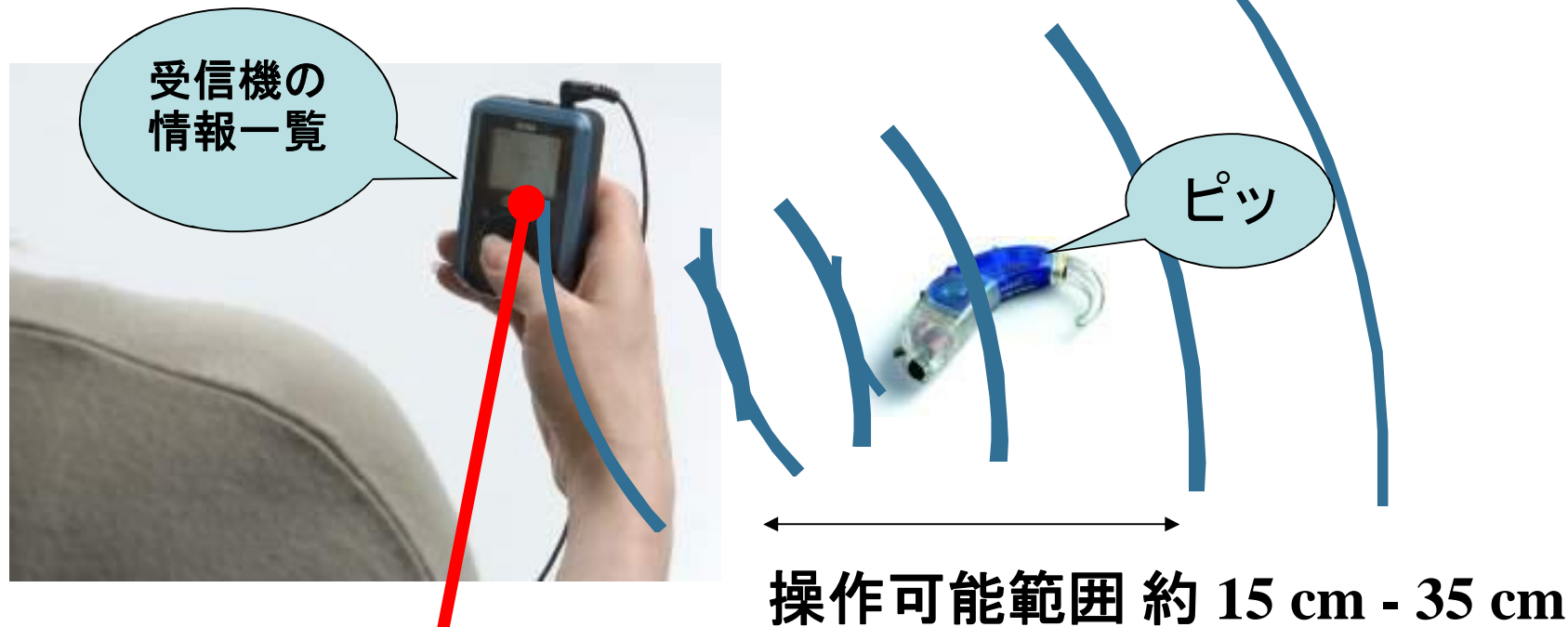

画面表示


設定
シンクロ中

受信機からの
返答を受信

Name:		FM	S	Ch
Haruko	L	M1	✓	01
Natsumi	R	M1	✓	01
Akio	R	M1	✓	01

フレックス設定メニューに入る

- ティーチのプロメニューからスコラフレックスを選択

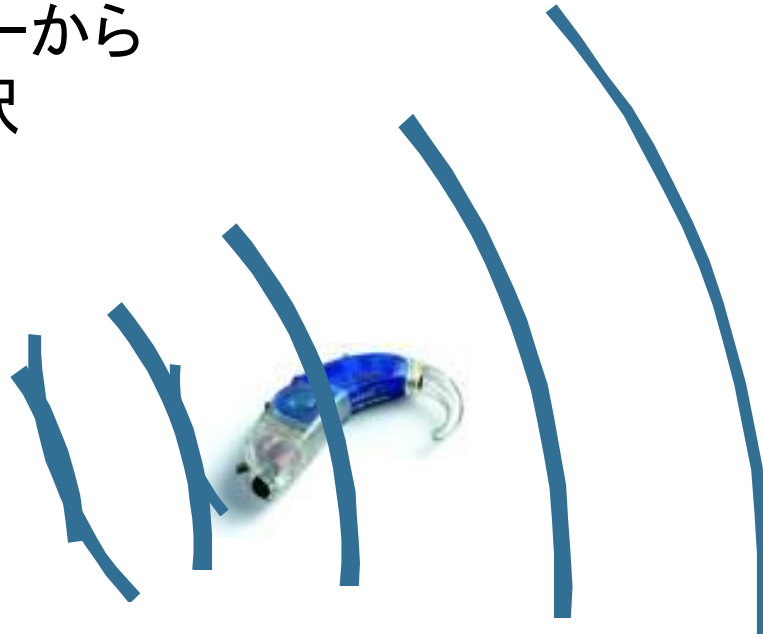

操作可能範囲 約 15 cm - 35 cm

画面表示

シリアル	名前	
01234567	Haruko	-


通信に失敗するとメッセージが表示

受信機が検出されません。
何かキーを押してください。

位置関係を確認し、再試行します。

設定をフレックスへ送信する

- 設定が終了したら、その内容をフレックスへ送信する。フレックスメニューの「送信」を実行

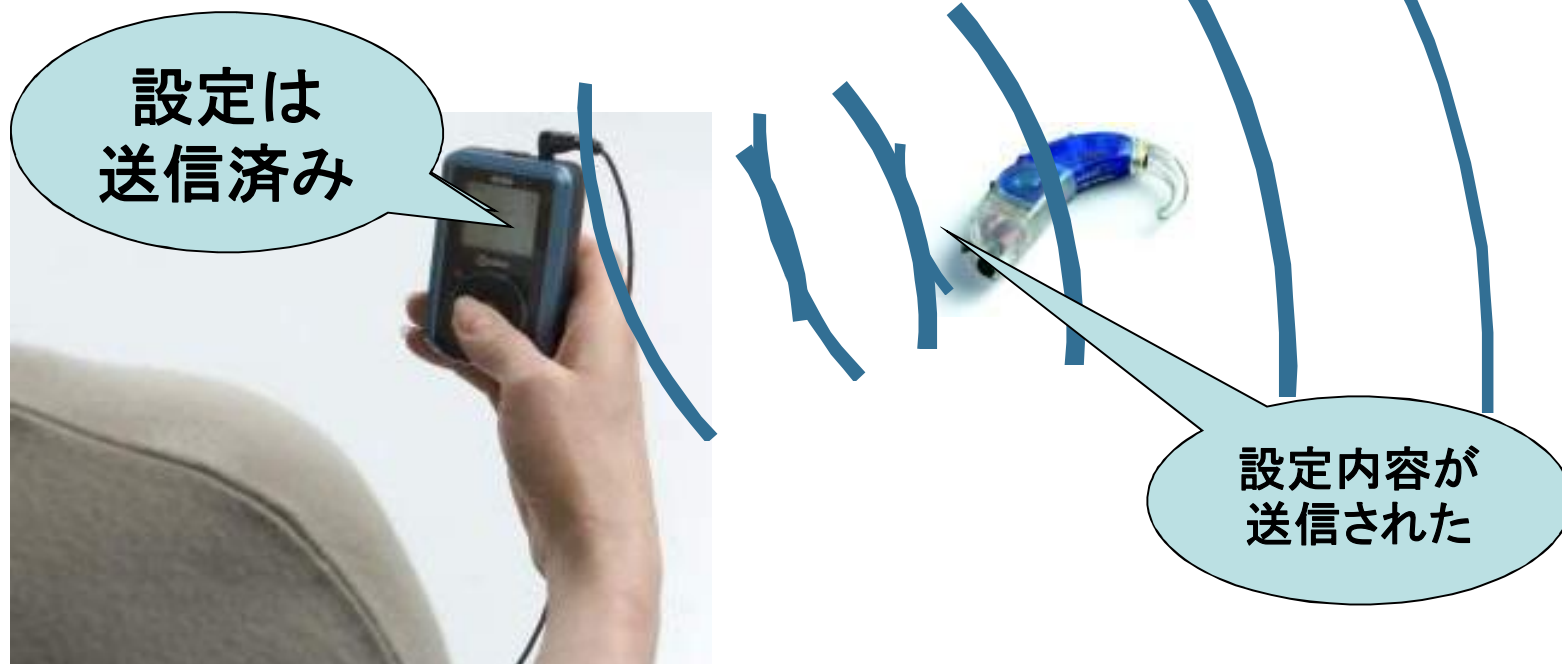

操作可能範囲 約 15 cm - 35 cm