

左右識別マークの取り付けに関するお願い

謹啓

貴社ますますご盛栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、下記いたしました弊社製品につきましては、補聴器本体の左右識別マークを取り付け部位に透明保護カバーを付けた状態で出荷をさせていただいております。当該製品には、付属品として左右識別マークを同梱出荷させていただいておりますが、必要に応じて下記手順により補聴器本体への左右識別マークの取り付けをお願い申し上げます。 謹白

記

<対象製品>

◆ 弊社全シリーズのmモデル、FUSIONモデル、及びPASSIONモデル


<交換手順>

1. 透明保護カバー または 左右識別マークの取り外し

mモデル、FUSIONモデルの場合は、拡大鏡、精密ピンセット、及び下記手順を用いることで部品の取り外しが可能ですが、取り外しが困難と思われた場合は弊社までお送りください。


PASSIONモデルに関しては、補聴器本体の左右識別マーク取り付け部位に既に部品(透明保護カバー、または左右識別マーク)が取り付けられていた場合、その部品の取り外しが困難ですので、部品の取り外しが必要な場合は弊社までお送りください。

(注) 補聴器を分解しての取り外しは決して行わないでください。

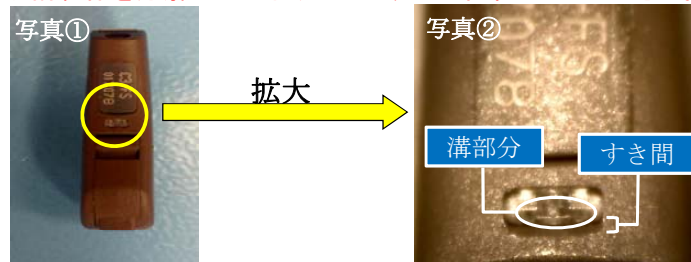


拡大鏡でこの部位を見ますと、識別マーク取り付け部位には写真②の白枠部分のごとく補聴器本体と識別マーク間にすき間があり、かつ、識別マーク自体に溝が付いています。この溝部分に先細の精密ピンセット等を差し当て、上方向に上げることで透明保護カバー、または 左右識別マークを取り外すことができます。

2. 左右識別マークの取り付け

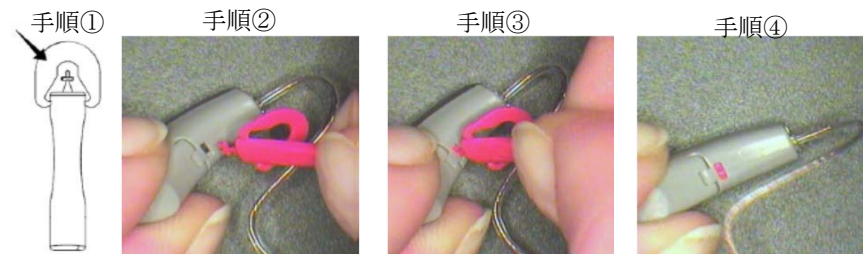

- ① 矢印の識別マーク保護キャップを折り曲げる。
- ② 当該モデルの左右識別マーク取り付け部位に、識別マークを差し込む。
- ③ 持ち手になっているピンを回転させ、識別マークと分離する。
- ④ 取り付けした識別マークの表面に突起がないか指先で確認する。

【左右識別マーク取り付け部位】

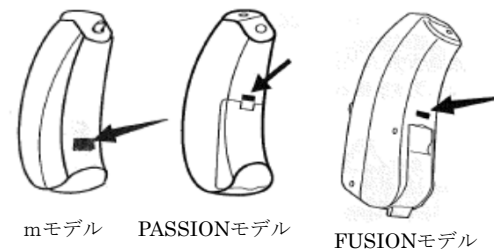

【識別マーク取り付けツール】

