



1. ソフトイヤモールドにレシーバーを取り付ける場合


イヤワイヤ付レシーバー（サイズ 01～05）を選択します。
ソフトイヤモールドの大きい穴から小さい穴にイヤワイヤを通します。

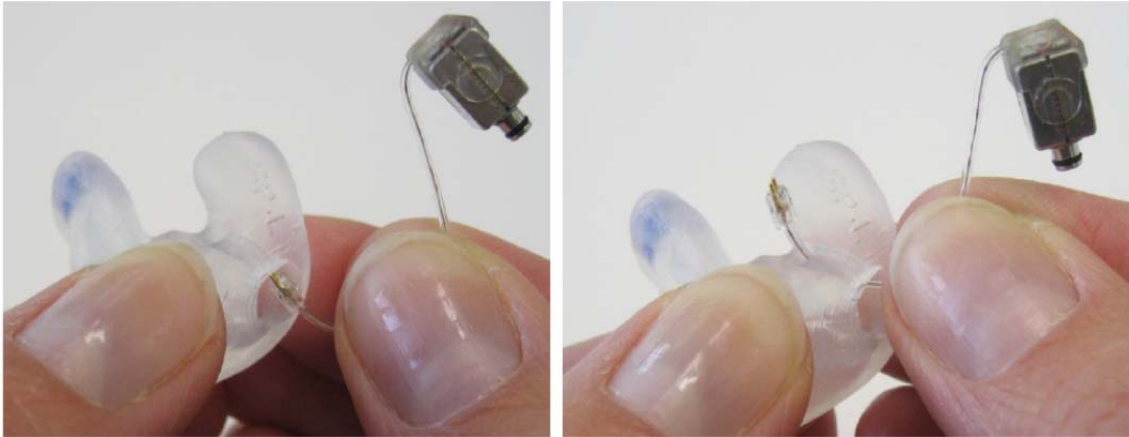

イヤワイヤを押し上げながら、ソフトイヤモールドにレシーバーを取り付けます。

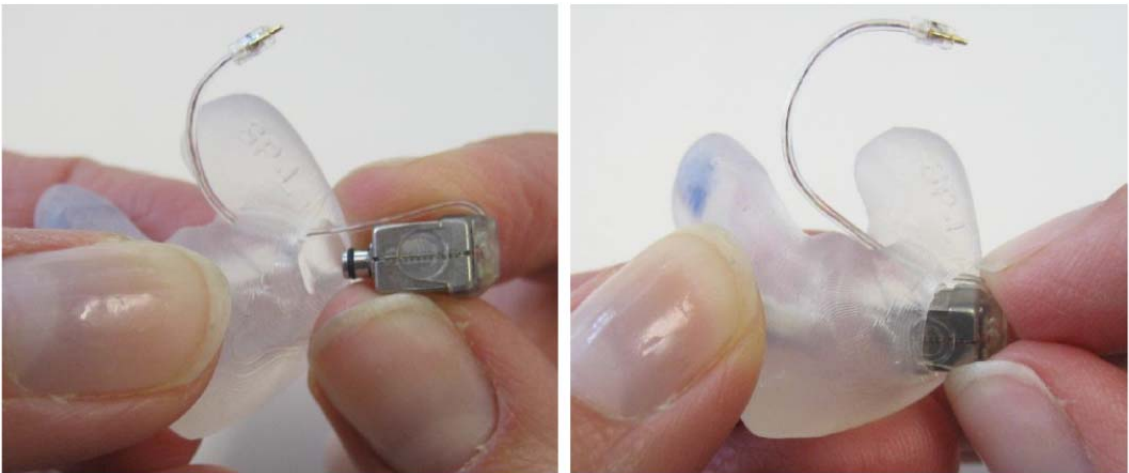

レシーバーの先端が、イヤモールド内部の接続ツールにしっかり取り付けられていることを確認します。
きちんと取り付けると、カチッという音がします。

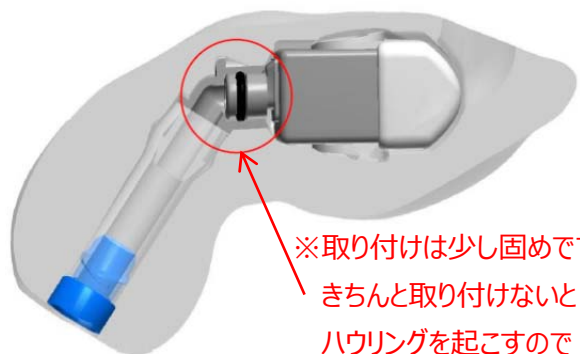


※取り付けは少し固めです。
きちんと取り付けないと
ハウリングを起こすので
ご注意ください。

2. ソフトイヤモデルからレシーバーを取り外す場合

レシーバーを取り外す際は、専用のツールを使用します。

ツールを軽くつまんだ状態で持ち、イヤモデル内のレシーバーに沿わせてゆっくり挿入します。

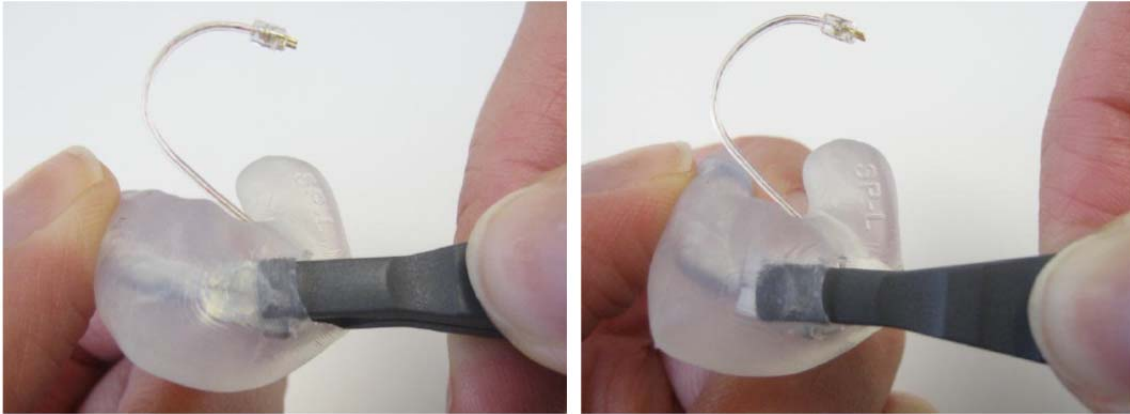

カチッという感触がするまでツールを挿入し、レシーバーをしっかり挟んでいることを確認したら、まっすぐレシーバーを引き出します。引き出す際、レシーバーをねじったりしないでください。

最後にイヤワイヤを引き抜きます。

