

フィッティングツールガイド

**BEYOND UNIQUE
DREAM DAILY**

CIC MICRO 以外

CIC MICRO



**CLEAR
SUPER**

**MENU
mind**



ワイヤレス接続

有線接続

ワイヤレス接続

有線接続



USB Link



USB Link
+



WIDEX LINK CONNECTOR



USB Link



NOAHlink

+



CIC
m/m-CB
PASSION

または

または

または



nEARcom



nEARcom
+



WIDEX LINK CONNECTOR



nEARcom



X



9



19



38/SP

接続方法は裏面を参照

接続方法は裏面を参照

有線接続用


プログラムシューの接続方法



CIC / CIC MICRO

バッテリーホルダーを45度開き、軽くひねりながら取り外す(本体と電池ドアを接続している左右2本の支柱から片側ずつ取り外す)。


プログラミングケーブルの先にアダプター(CIC用)を接続する。アダプターをフェイスプレートに「カチッ」というまで差し込んで固定する。

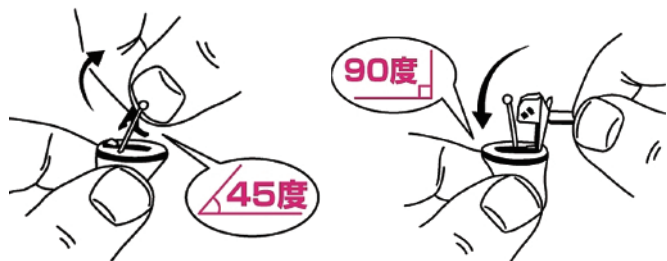

m/m-CB PASSION


バッテリーホルダーを開く。ベント用クリーニングツールなど細いものを、バッテリーホルダーの軸部分に差し込む。クリーニングツールを挟んだまま、バッテリーホルダーを閉じるように軽く押し、バッテリーホルダーが外れる。

プログラミングアダプターを、左右2本の軸に45度の角度でしっかり差し込む。「カチッ」というまで、プログラミングアダプターを閉じて固定する。

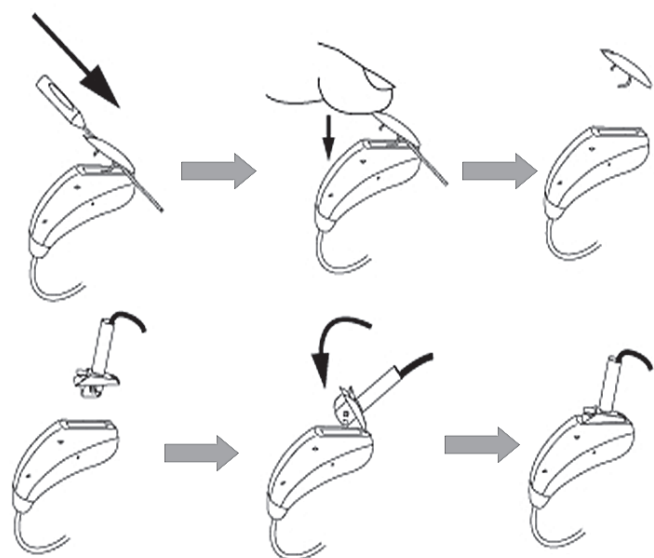


X

グレーのつまみを手前に引き、アダプターを補聴器本体に押しつけながら、つまみを押ししてロックする。外す時はつまみを手前に引く。

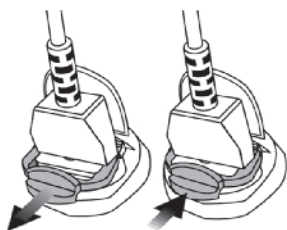

9

アダプターを下側から上方向に押しつけ、「カチッ」というまで差し込んで固定する。

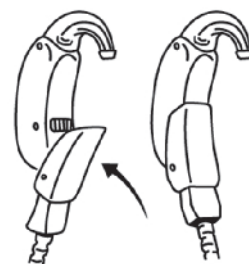

19

アダプターを下側からまっすぐ「カチッ」というまで差し込んで固定する。



38/SP

アダプターを接続する時は、補聴器側面にある半円形のカバーを外し、まっすぐ差し込む。

