


Noah4 に Compass・COMPASS GPS が表示されない場合


当手順書は Noah4 のモジュールバーに Compass または COMPASS GPS が表示されない場合にお使いください。

【COMPASS の場合】

1. 「Compass Demo」を右クリックし、「ファイルの場所を開く(I)」をクリックします。

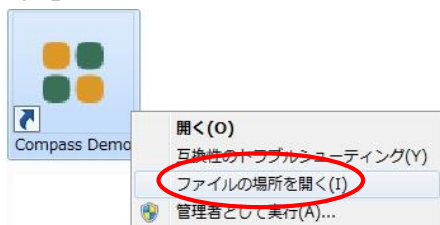


2. 「modinst(.exe)」をダブルクリックします。

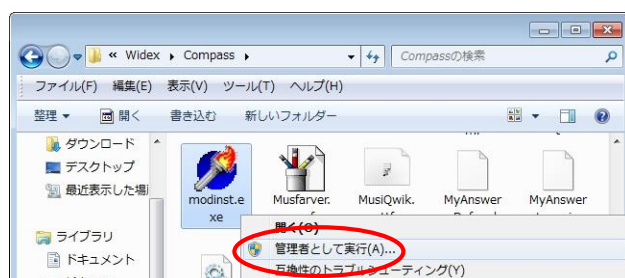

※ユーザーアカウント制御画面が表示された場合は、「はい」または「続行」をクリックしてください。


3. 「Register」ボタンをクリックします。

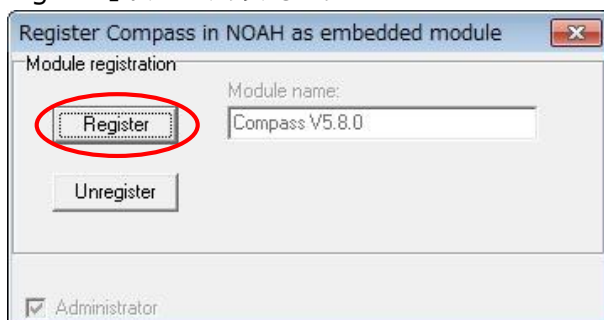

4. 「Register」ボタンをクリック後、5 秒以上経過した後で「[X]」ボタンで画面を閉じます。また、他の画面も「[X]」ボタンで閉じます。

【COMPASS GPS の場合】

- ① 「スタート」→「すべてのプログラム」→「Widex」→「COMPASS GPS」→「Support」→「R COMPASS GPS Module Registration」の順にクリックします。

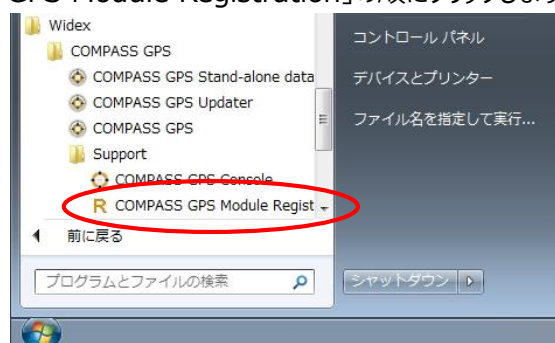


※ユーザーアカウント制御画面が表示された場合は、「はい」または「続行」をクリックしてください。

- ② 「Register」ボタンをクリックします。



- ③ 「Registered」と表示されたら、「Close」ボタンで閉じます。

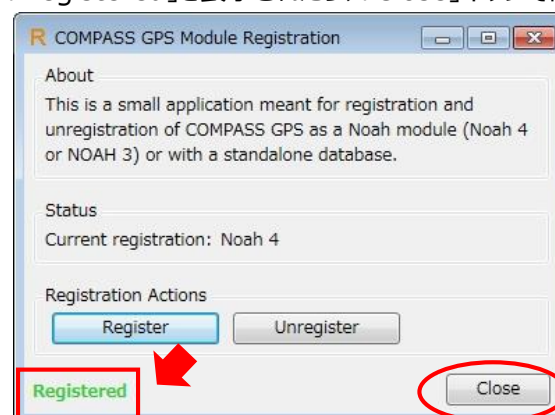

最後に Noah4 を起動し、モジュールバーに Compass または COMPASS GPS が表示されたことを確認します。



以上で設定は完了です。