




重要：COMPASS GPS V3.3 SP1 インストール前の注意

- COMPASS GPSのインストールにはDVDドライブが必要です。**CDドライブではインストールできません。**
 - 必要動作環境：Microsoft Windows 10（バージョン1607）以降、Windows 8.1、Windows 7 SP1
Microsoft .NET Framework 2.0及び.NET Framework 4.7.2以降
- ※マイクロソフト社のサポートが終了している**Windows 10（バージョン1511以前）**や**Windows 8、サービスパックが適用されていないWindows 7**は、.NET Framework 4.7.2に対応していないため、そのままでは**インストールできません。**
Windows UpdateなどでOSを更新してください。Windowsのバージョン確認は、下記「Windowsのバージョン確認方法」をご確認ください。
- また、購入直後のWindows 10 PCやWindows 8.1 PCでは.NET Framework 2.0を含む.NET Framework 3.5が無効になっています。.NET Framework 3.5を有効にしてください。有効化の手順は下記「.NET Framework 3.5の有効化」をご確認ください。（インターネット接続が必要です。）

COMPASS GPS V3.2またはV3.3がインストール済みのパソコンは、上記動作環境を満たしていますので確認は不要です。
裏面の「COMPASS GPS V3.3 SP1 インストール手順」へ進んでください。

Windowsのバージョン確認方法

1. キーボードのWindowsキー()を押しながら「」キーを押します。
2. 名前の欄にキーボードから「winver」と入力し、「OK」ボタンをクリックします。

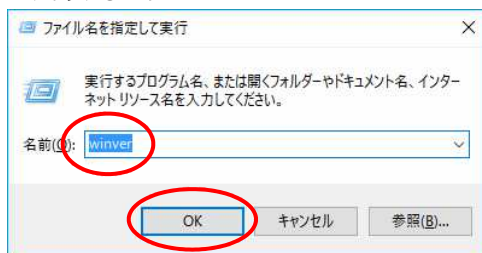

3. 対象OSかどうか確認します。



(参考) Windows 10の場合

インストールに必要な各OSのバージョン
Windows 10：バージョン 1607以降
Windows 8.1：バージョン6.3
Windows 7：バージョン6.1 (ビルド7601 Service Pack 1)

4. 「OK」ボタンで「Windowsのバージョン情報」画面を閉じます。

.NET Framework 3.5の有効化

.NET Framework 3.5を有効化するには、インターネット接続が必要です。

1. 「コントロールパネル」を開きます。
2. 「プログラムのアンインストール」、または「プログラムと機能」をクリックします。
3. 「Windowsの機能の有効化または無効化」をクリックします。

4. **.NET framework 3.5のチェックボックスをオン**にし、「OK」ボタンで閉じます。
5. 「Windows Updateでファイルを自動ダウンロードする」をクリックします。
6. インストールが終わったら「閉じる」をクリックします。

COMPASS GPS V3.3 SP1 インストール手順

1. COMPASS GPS DVDをパソコンのDVDドライブに挿入します。
2. 「自動再生」画面が表示された場合は「フォルダーを開いてファイルを表示」をクリックします。
「自動再生」画面が表示されない場合は、タスクバーのエクスプローラー()から開きます。



3. 「Setup(.exe)」を右クリックし、「管理者として実行(A)...」をクリックします。
「ユーザーアカウント制御」画面が表示された場合は、「許可(A)」または「はい(Y)」ボタンをクリックします。
4. COMPASS GPSに必要なソフトのインストールを行います。「インストール」ボタンをクリックしてください。
※ GPSに必要なソフトがすでにインストールされている場合は表示されません。
※ 複数回、再起動を要求されることがあります。画面表示にしたがってパソコンを再起動してください。




5. 「COMPASS GPS用のInstallShield ウィザードへようこそ」画面で、「次へ(N) >」ボタンをクリックします。
6. 「使用許諾契約」画面で、「使用許諾契約の条項に同意します(A)」にチェックし、「次へ(N) >」ボタンをクリックします。

新規インストールの場合は 7.へ、
バージョンアップの場合は 12.へお進みください。

7. 「インストール先のフォルダー」画面で、「次へ(N) >」ボタンをクリックします。
8. 「言語を選択」画面で、「Japanese - JP」を選択し、「追加 >>」ボタンをクリックします。



9. 右の欄に「Japanese - JP」が追加されたことを確認し、「次へ(N) >」ボタンをクリックします。

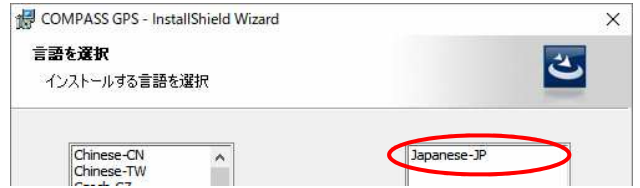

10. 「通常使用する言語を選択」画面で、プルダウンメニューから「Japanese - JP」を選択し、「次へ(N) >」ボタンをクリックします。




11. 「販売会社を選択」画面で「Japan」を選択し、「次へ(N) >」ボタンをクリックします。

12. 「プログラムをインストールする準備ができました」画面で「インストール(I)」ボタンをクリックします。

COMPASS GPSのインストールが開始されます。
インストール完了まで、しばらくお待ちください。

13. 「InstallShield ウィザードを完了しました」画面で、新しいパソコンなどUSB Linkの設定が必要な場合のみ「Widex USB Linkドライバーを...」のチェックを入れて「完了(F)」ボタンを、USB Linkを既にお使いの方はチェックを入れず、「完了(F)」ボタンをクリックします。

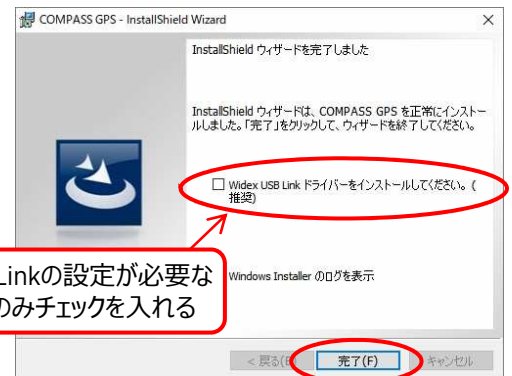

USB Linkの設定が必要な場合のみチェックを入れる

14. 開いているウィンドウを閉じます。COMPASS GPS DVDをパソコンから取り出し、パソコンを再起動してください。

以上で、COMPASS GPSのインストールは完了です。