



Compass GPS の自動アップデートの方法

吹き出しが出た場合

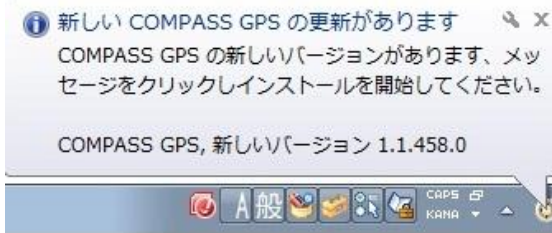

※PCによっては、このような吹き出しがでてくる場合があります。吹き出しをクリックすると、4番の画面に変わります。4番以降を参照してインストールを進めてください。

- 1 手動更新する場合には、PC 画面右下の「△」アイコンを押すと「

- 2 「更新の確認」をクリックし、Compass GPS の最新バージョンをダウンロードします。




- 3 Compass GPS のダウンロードが始まります。ダウンロードにはお時間がかかりますので、しばらくお待ちください。




- 4 「更新プログラムのインストール」を押します。インストールの準備が始まります。




- 5 「次へ(N)>」をクリック。

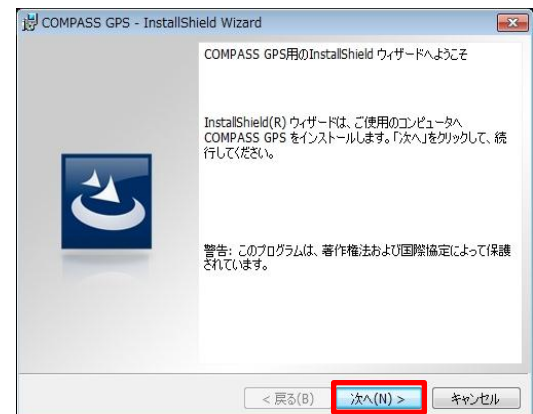


- 6 「使用許諾契約の条項に同意します(A)」を選択し、「次へ(N)>」をクリック。

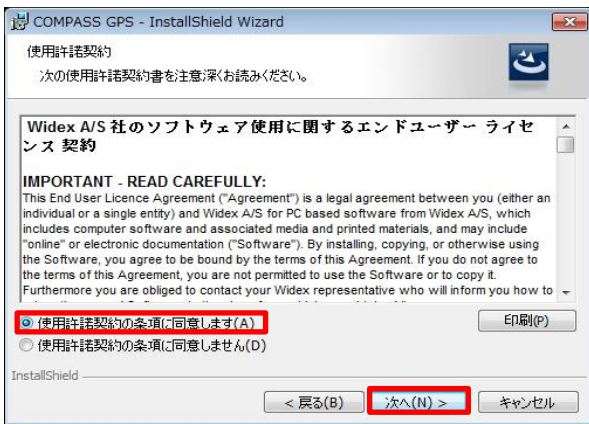


- 7 「インストール(I)」をクリック。
インストールが完了するまで、しばらくお待ちください。

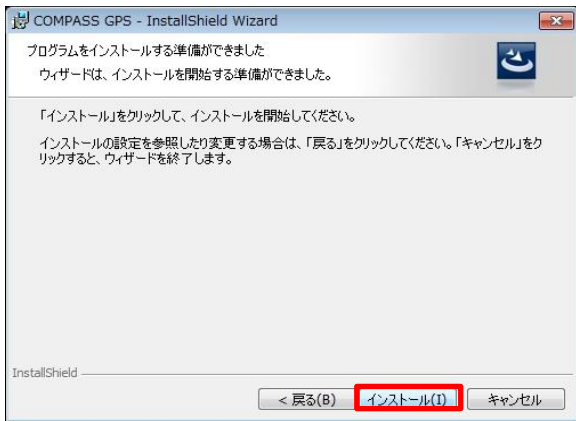

- 8 「完了(F)」をクリック。
以上でインストール作業は終了です。

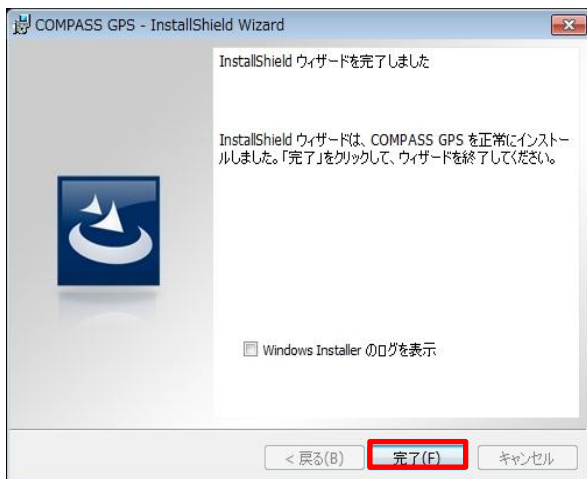

バージョンアップの確認

PC画面右下の「△」アイコンを押すと、「」のアイコンがあるのでクリックします。
インストール済みバージョンを確認してください。



以上で、Compass GPSの自動アップデートの作業が終わりになります。
Compass GPSを立ち上げ、起動確認を行ってください。