

COMPASS GPSインストールマニュアル

～V2.4～


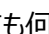


◎ COMPASS GPSのインストールにDVDドライブが必要です。**CDドライブではインストールできません。**

◎ COMPASS GPSでの調整には、**USB Link**や**nEARcom**が必要です。

NOAHlinkや**Hi-Pro**では調整いただけません。

◎ COMPASS GPSの必要動作環境：Windows Vista SP2以降、及びNoah 4.4以降を推奨


※Windows XP及びNOAH3のサポートはすでに終了しています。

- 1  COMPASS GPS DVDをパソコンのDVDドライブに挿入してください。
- 2 「自動再生」画面が表示された場合は「**フォルダーを開いてファイルを表示**」をクリックしてください。
Windows 8以降は、画面右上や右下に表示される「このディスクに対して行う操作を選んでください」をクリックすると自動再生の項目が表示されます。
COMPASS GPS DVDをパソコンのDVDドライブに挿入しても何も表示されない場合は、「 コンピューター」や「」アイコンからDVDドライブを右クリックし、「**開く(O)**」をクリックしてください。
- 3 「**Setup(.exe)**」を右クリックし、「 **管理者として実行(A)...**」をクリックしてください。
「**ユーザーアカウント制御**」画面が表示された場合は、「**許可(A)**」または「**はい(Y)**」ボタンをクリックしてください。
- 4 COMPASS GPSに必要なソフトのインストールを行います。「**インストール**」ボタンをクリックしてください。
※すでに必要なソフトがインストールされている場合は表示されません。
- 5 「**COMPASS GPS用のInstallShield ウィザードへようこそ**」画面で、「**次へ(N) >**」ボタンをクリックしてください。
- 6 「**使用許諾契約**」画面で、「**使用許諾契約の条項に同意します(A)**」にチェックし、「**次へ(N) >**」ボタンをクリックしてください。

新規インストールの場合は 7へ、バージョンアップの場合は 12へお進みください。

- 7 「**インストール先のフォルダー**」画面で、「**次へ(N) >**」ボタンをクリックしてください。
 - 8 「**言語を選択**」画面で、「**Japanese - JP**」を選択し、「**追加 >>**」ボタンをクリックしてください。
 - 9 右の欄に「**Japanese - JP**」が追加されたことを確認し、「**次へ(N) >**」ボタンをクリックしてください。
 - 10 「**通常使用する言語を選択**」画面で、プルダウンメニューから「**Japanese - JP**」を選択し、「**次へ(N) >**」ボタンをクリックしてください。
 - 11 「**販売会社を選択**」画面で「**Japan**」を選択し、「**次へ(N) >**」ボタンをクリックしてください。
 - 12 「**プログラムのインストールする準備ができました**」画面で「**インストール(I)**」ボタンをクリックしてください。
- COMPASS GPSのインストールが開始されます。インストール完了まで、しばらくお待ちください。**
- 13 「**InstallShield ウィザードを完了しました**」画面で、新しいパソコンなどUSB Linkの設定が必要な場合のみ「**Widex USB Linkドライバーを...**」のチェックを入れて「**完了(F)**」ボタンを、USB Linkを既にお使いの方は、チェックを入れず、「**完了(F)**」ボタンをクリックしてください。

USB Linkの設定が必要な場合のみチェックを入れる

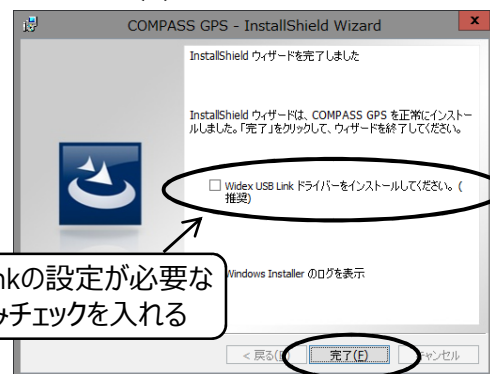

14 開いているウィンドウを閉じます。COMPASS GPS DVDをパソコンから取り出し、パソコンを再起動してください。

以上で、COMPASS GPSのインストールは完了です。

新規のインストールの場合は、下記「COMPASS GPSの設定変更」を行います。

以前のバージョンがインストールされていたパソコンでは、以下の設定変更を行う必要はありません。

①デスクトップ上の「COMPASS GPS」アイコンを右クリックし、「管理者として実行(A)...」をクリックしてください。

※「ユーザーアカウント」制御画面が表示されたら、「許可する」または「はい」ボタンをクリックしてください。

※GPSの起動は別紙のUNIQUEフィッティングガイドや、DREAMクイックガイドをご参照ください。

②「COMPASS設定」→「インターフェース」の順にクリックしてください。



③「選択可能なインターフェース」内の「USB Link」をダブルクリックしてください。




④「使用可能なインターフェース」に移動した「USB Link」を1回クリックし、「テスト」ボタンをクリックしてください。



⑤「USB Linkへの接続ができました」と表示されたら、「OK」ボタンをクリックしてください。



⑥続いて、「聴力データ」タブをクリックし、「トランスデューサーを指定」の項目で、プルダウンメニューから「ヘッドホン」を選択してください。

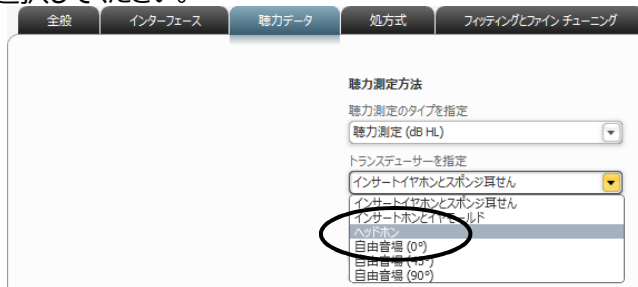

⑦「フィッティングとファインチューニング」タブをクリックし、「順応機能」で、「順応機能 有効」にチェックしてください。



以上で設定変更は完了です。