

※Windows XP 及び NOAH3 のサポートはすでに終了しています。


1 **Compass V5.9.1 CD (CD1)** をパソコンの CD (または DVD) ドライブに挿入してください。

2 自動再生画面が表示されたら、「フォルダーを開いてファイルを表示」を選択してください。

Windows 8 以降は、画面右上に表示される「このディスクに対して行う操作を選んでください」をクリックすると自動再生の項目が表示されます。




3 「 **Setup(.exe)**」を右クリックし、「 **管理者として実行(A)...**」をクリックしてください。

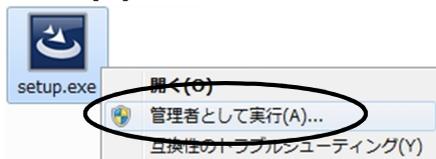

4 「Compass の InstallShield Wizard へようこそ」画面で、「次へ(N)>」ボタンをクリックしてください。

5 「使用許諾契約」画面で、「はい(Y)」ボタンをクリックしてください。

6 「セットアップタイプ」画面で、「**Minimum installation**」を選択し、「次へ(N)>」ボタンをクリックしてください。

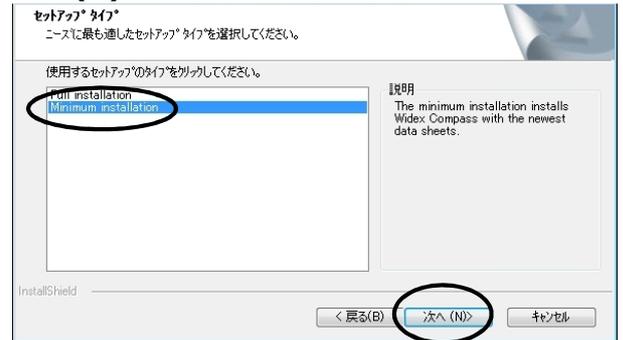

7 「インストール先の選択」画面で、「次へ(N)>」ボタンをクリックしてください。

8 「プログラムフォルダの選択」画面で、「次へ(N)>」ボタンをクリックしてください。

9 「国の選択」画面で、「**Japan**」を選択し、「次へ(N)>」ボタンをクリックしてください。

10 「言語を選択してください。」画面で、「**Japanese**」を選択し、「次へ(N)>」ボタンをクリックしてください。

11 「他の言語を選択して下さい。」画面で、「次へ(N)>」ボタンをクリックしてください。

12 「ショートカットの追加」画面で、「はい」にチェックをし、「次へ(N)>」ボタンをクリックしてください。


13 「ファイル コピーの開始」画面で、「次へ(N)>」ボタンをクリックして下さい。

※ファイルのコピーが始まります。

コピーが終わるまで、しばらくお待ち下さい。

また、パソコンによってはコピーが開始されるまで数分かかる場合があります。誤ってパソコンを再起動しないでください。

- 14** 下記画面が表示されたら、パソコンから Compass V5.9.1 CD (CD1) を取り出し、Compass V5.9.1 CD (CD2) を挿入してください。CD (CD2) を挿入後、**CD の回転が緩やかになった後、「OK」ボタンをクリックしてください。**

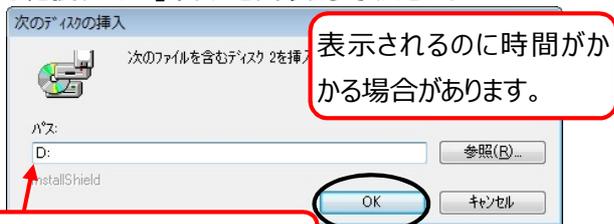


パスに書かれているアルファベットはお使いのパソコンによって異なります。

※CD を入れ替えた際、自動再生画面が表示されることがあります。右上の「」ボタンをクリックして画面を閉じてください。


- 15** 「Reminder」画面で、「次へ (N)>」ボタンをクリックしてください。

- 16** 「InstallShield Wizard の完了」画面で、「はい、今すぐコンピューターを再起動します。」にチェックし、「完了」ボタンをクリックしてください。

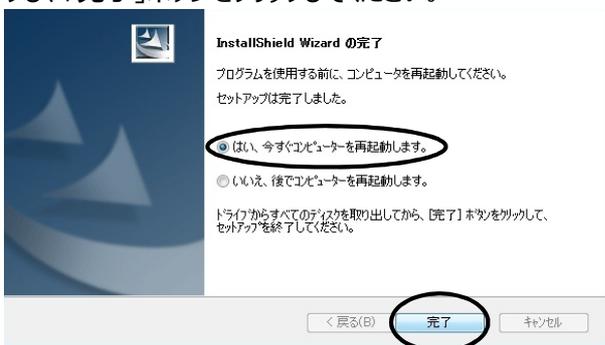

- 17** 再起動が終わったら、パソコンから Compass V5.9.1 CD (CD2) を取り出してください。

- 18** デスクトップまたはスタートメニュー内の「Compass Demo」アイコンを右クリックし、「管理者として実行 (A)...」をクリックしてください。

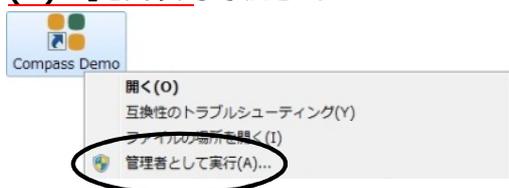

「ユーザーアカウント制御」画面が表示された場合は、「許可(A)」または「はい(Y)」をクリックしてください。



この手順を行わないと Compass の起動時にユーザーアカウント制御画面が表示されたり、Noah4 から Compass が起動できなくなる可能性があります。

以上で、Compass の起動確認は終了です。