


COMPASS GPS間のデータ移行

○COMPASSコンソールの起動


・Windows 10 / 7 の場合

「スタート」ボタン → 「COMPASS GPS Tools」 → 「COMPASS GPS Console」の順にクリックします。

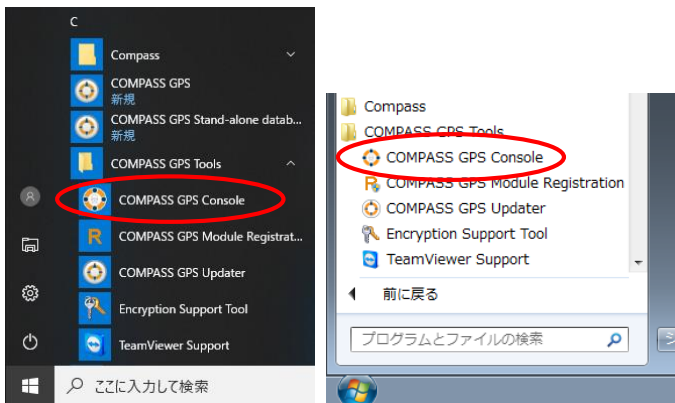

・Windows 8.1 / 8の場合

「Windows」キー + 「C」キーでチャームを開き、検索窓で「COMPASS GPS Console」と検索、検索結果から「COMPASS GPS Console」をクリックします。

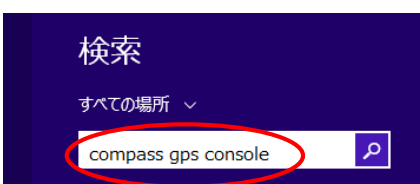


「COMPASSコンソール ログオン」画面でCOMPASS GPSのログインに使うイニシャルとパスワードを入力し、「OK」ボタンをクリックします。

イニシャル： **ADM**


パスワード： **GPS**

※ともに半角英字

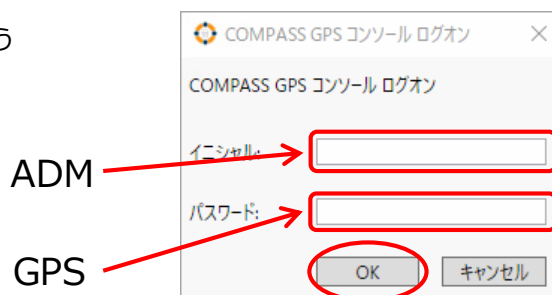


○データベース管理

GPSデータベースを操作する場合は、画面左側の「Database tools」をクリックします。

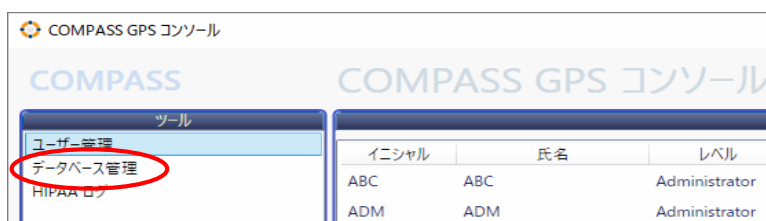

<Database tools サービス画面>

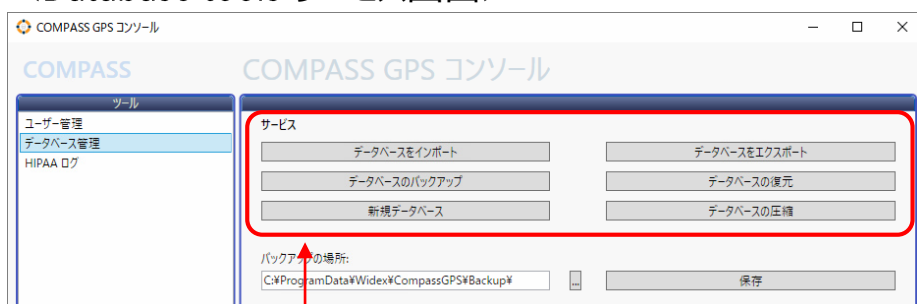

- データベースをインポート：顧客データの取り込み
- データベースをエクスポート：顧客データの取り出し
- データベースのバックアップ：GPSデータベースの手動バックアップ
- データベースの復元：GPSデータベースのバックアップデータからの復旧
- 新規データベース：既存のデータを破棄し、空のデータベースへ置換え

○ 他のパソコンのCOMPASS GPSのデータベースへ移行する方法は2つあります。

① データベースのエクスポート・インポート


移行先のパソコンのCOMPASS GPSデータベースに顧客データが存在し、今回の移行するデータを追加する場合。ただし、**移行するデータにはオーディオグラムは含まれません。**

② データベースのバックアップ・復元

パソコンの買い替えなどで、移行先のパソコンのCOMPASS GPSデータベースに顧客がない場合。**移行するデータにオーディオグラムが含まれます。**

① データベースのエクスポート・インポート


1. 移行元のパソコンのCOMPASS GPS コンソールで、「データベースをエクスポート」ボタンをクリックします。

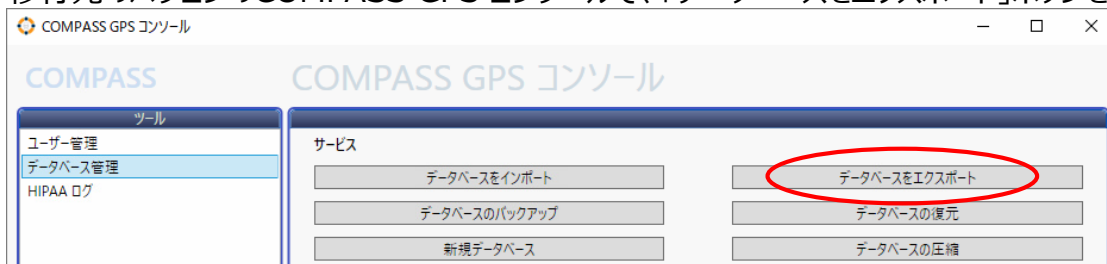


2. エクスポートしたデータを保存するフォルダを指定します。今回は、USBメモリにデータを保存します。



3. ファイル名を入力し、「保存(S)」ボタンをクリックします。

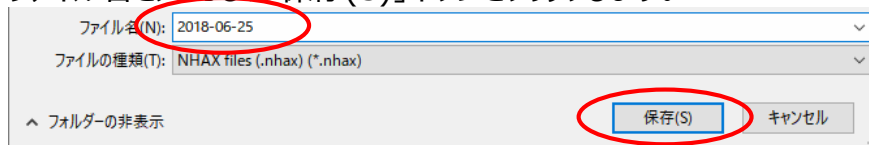


4. 「OK」ボタンをクリックします。

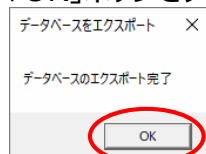


5. USBメモリを取り外し、移行先のパソコンに取り付けます。


6. 移行先のパソコンでCOMPASS GPS コンソールを開き、「データベースをインポート」ボタンをクリックします。

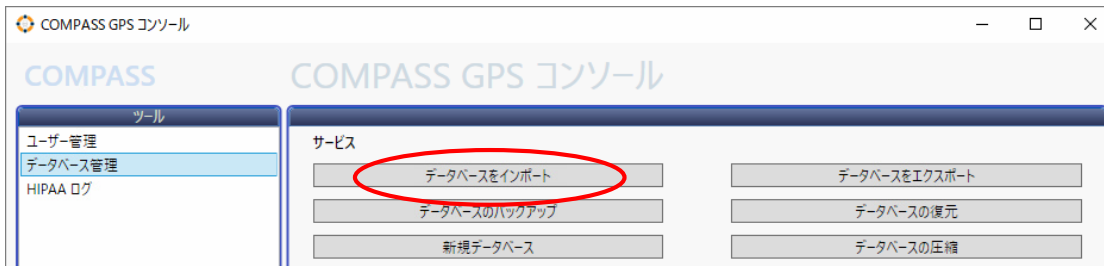

7. 移行データを選択し、「開く(O)」をクリックします。今回はUSBメモリを開いています。

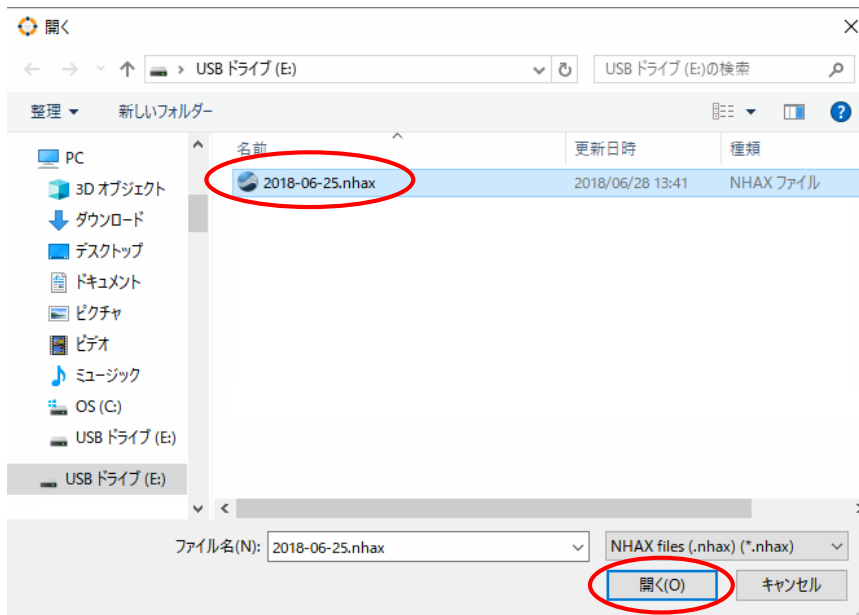

8. 「OK」ボタンをクリックします。

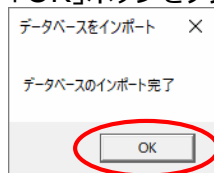


9. 移行元・移行先のCOMPASS GPS コンソールを「×」ボタンで閉じます。

以上で、エクスポート・インポートは完了です。


②データベースのバックアップ

GPSスタンドアロンデータベースに保存してあるお客様のデータのバックアップを作成します。パソコンが万一故障しても、バックアップしたデータをCD-Rや外付けハードディスクなどの別媒体にコピーしておく、そのデータからお客様のデータを復元することができます。定期的なバックアップの作成をお勧めします。


1. 「データベースのバックアップ」ボタンをクリックします。

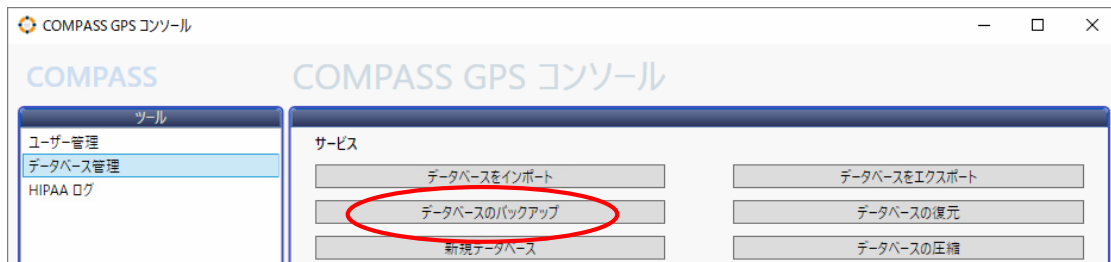

2. 「Backup Database」画面で「OK」ボタンをクリックします。

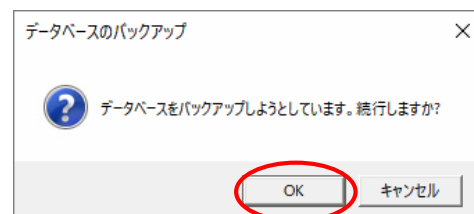

3. 「Backup complete.」と表示されたら「OK」ボタンをクリックします。

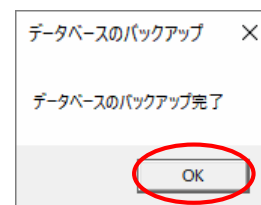


4. 「コンピューター」→「Cドライブ」→「Program Data」→「Widex」→「CompassGPS」→「Backup」の順に開きます。

※Program Dataフォルダが表示されない場合・・・



<Windows 7の場合>

「Alt」キーを押し、[ツール]→[フォルダー オプション(O)]をクリックします (Windows 7)。

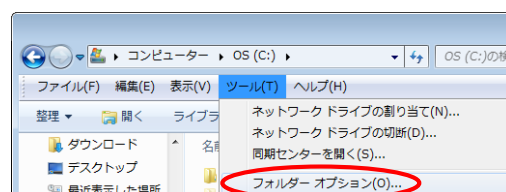


<Windows 10、Windows 8.1の場合>

「表示」タブの「隠しファイル」をチェックします。

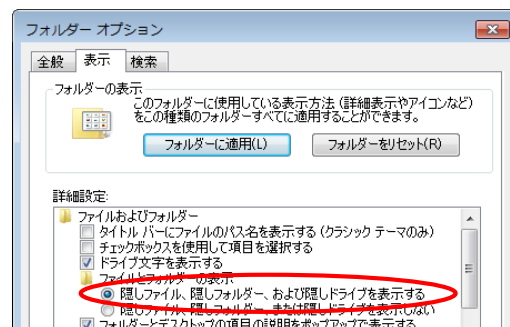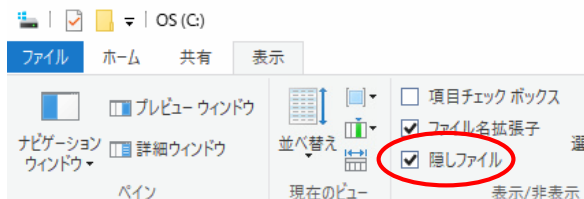

○データのコピー


5 「Backup」フォルダー内の「最新の日付」のフォルダをUSBメモリなどにコピーします。

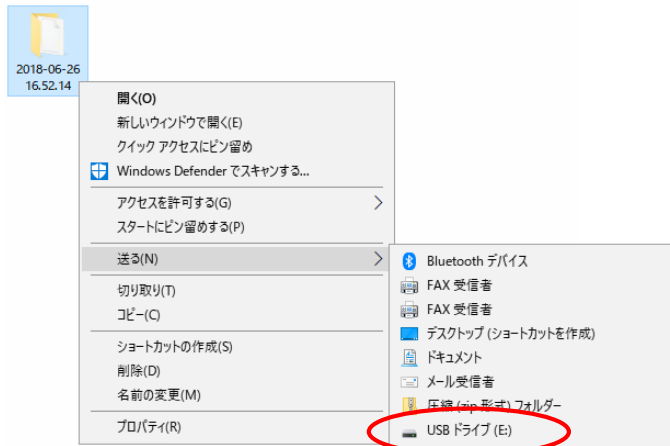


※今回はUSBメモリを使ってデータを移動します。

6 USBメモリをパソコンから外し、新しいパソコンに取り付けます。


7 1~2ページを参考に、Compass GPS Consoleを開き、「データベースの復元」ボタンをクリックします。

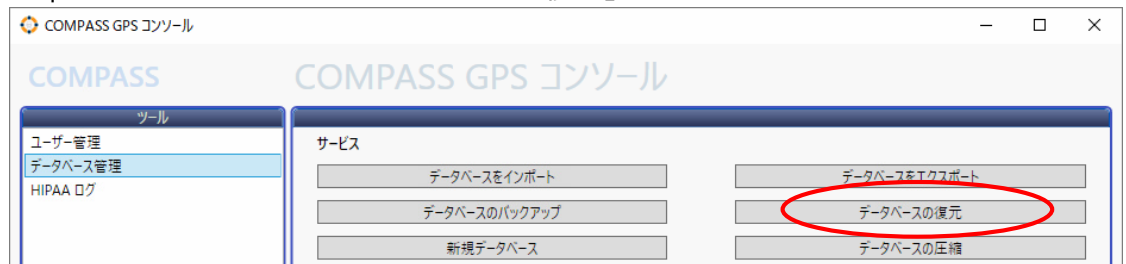

8 「データベースの復元」画面で「OK」ボタンをクリックします。

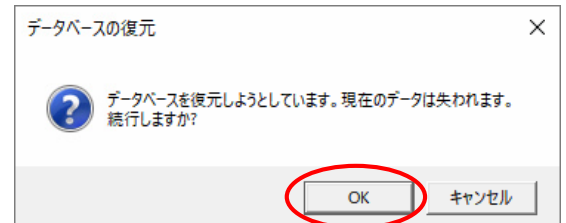


9 USBメモリ内の保存されているデータを開きます。

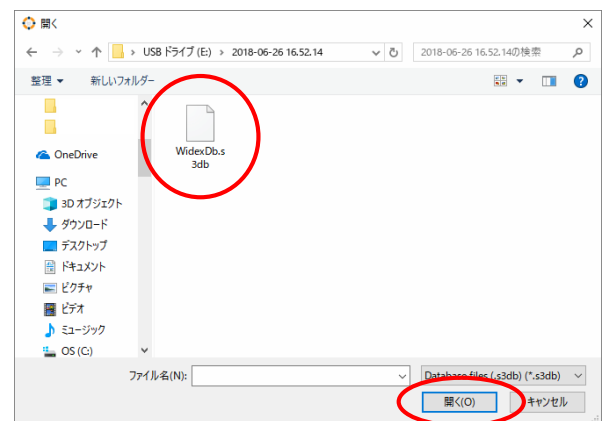

10 「OK」ボタンをクリックします。

以上でデータベースの移行は完了です。

COMPASS GPS Console画面を「」ボタンで閉じます。

